



Passez à l'excellence

APILUS[®]

xCell

27,12 MHz

- Description de l'appareil et branchement des câbles
- Écran d'accueil, modes de traitement et ajustement des paramètres
- Programmes et filaments
- Paramètres généraux
- Menu des tests
- Menu de configuration
- Sauvegarde, mises à jour, etc.
- Ajout de l'option Synchro

Pour xCell Pro seulement

- Menu des dossiers clients
- Menu de l'imprimante
- Menu des cartes à puces (SmartCard)



APILUS[®]
xCell Pur



APILUS[®]
xCell Pro

Description de l'appareil

APILUS®




Description de l'appareil

APILUS®




Branchement du porte-filament

APILUS®

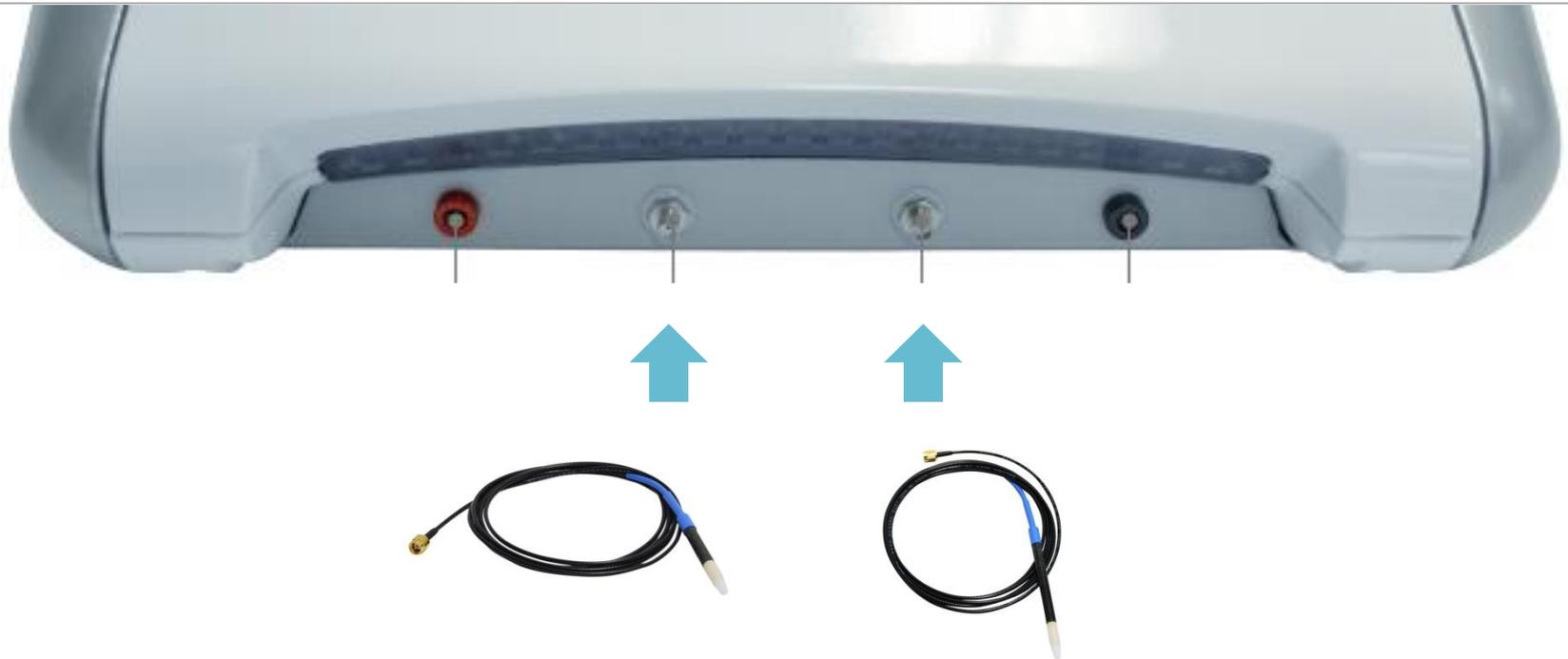

Porte-filament 27 MHz

- 2 porte-filaments inclus
 - Régulier
 - Court

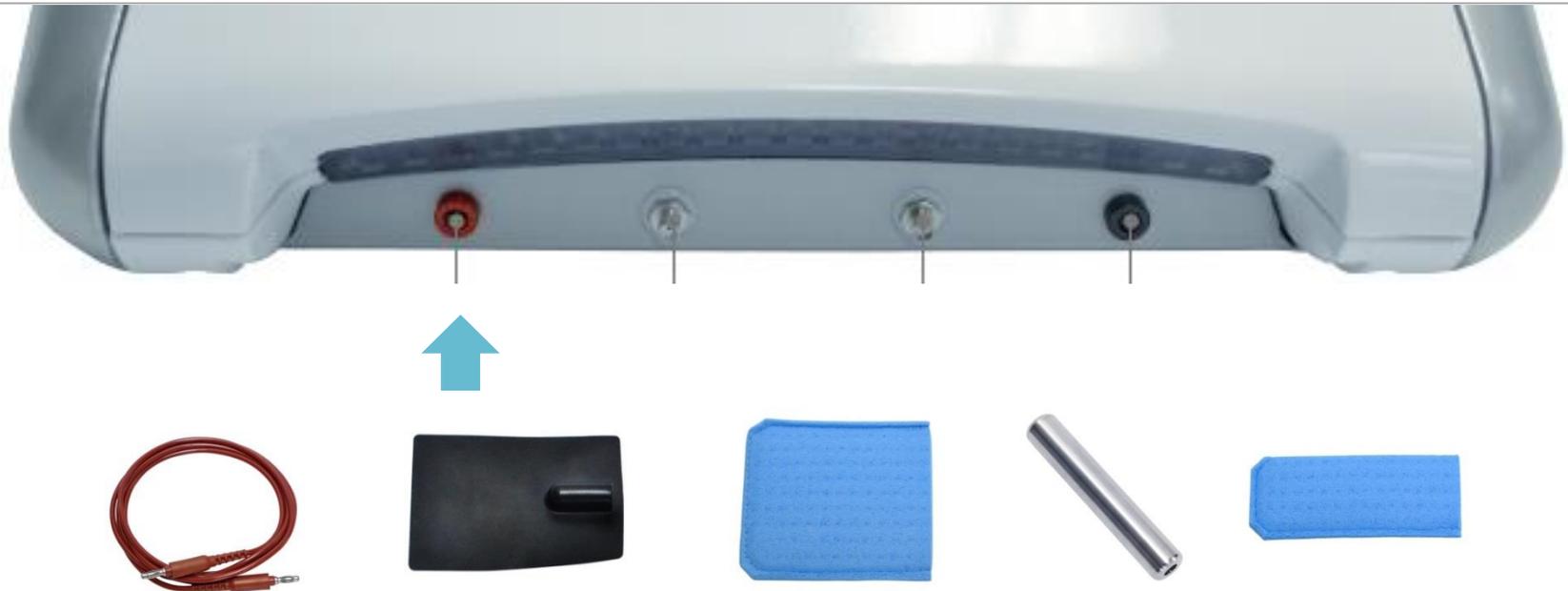

Câble rouge

- Doit-êtré branché avec l'électrode plaque ou l'électrode barre
- Doit êtré utilisé avec
 - Mode auto
 - Modes Blend et test de tolérance
 - Courant galvanique pure
- Le témoin rouge sur le connecteur rouge s'allumera quand cette électrode sera nécessaire.
- Toujours placer une éponge humide sur l'électrode.

Branchement des câbles

APIPLUS®




Câble noir

- Doit-être branché avec l'électrode rouleau
- Doit être utilisé avec
 - Anaphorèse
 - Cataphorèse
- Le témoin rouge sur le connecteur noir s'allumera quand cette électrode sera nécessaire.
- Toujours utiliser un produit à base d'eau sur la peau.
- **Non disponible aux É.U.**

Première mise en marche


Au moment de la première mise en marche, vous devez configurer les informations suivantes :

- Langue
- Date/Heure
- Carte à puce (Pro)
- Infos clinique (Pro)
- Superviseur (Pro)

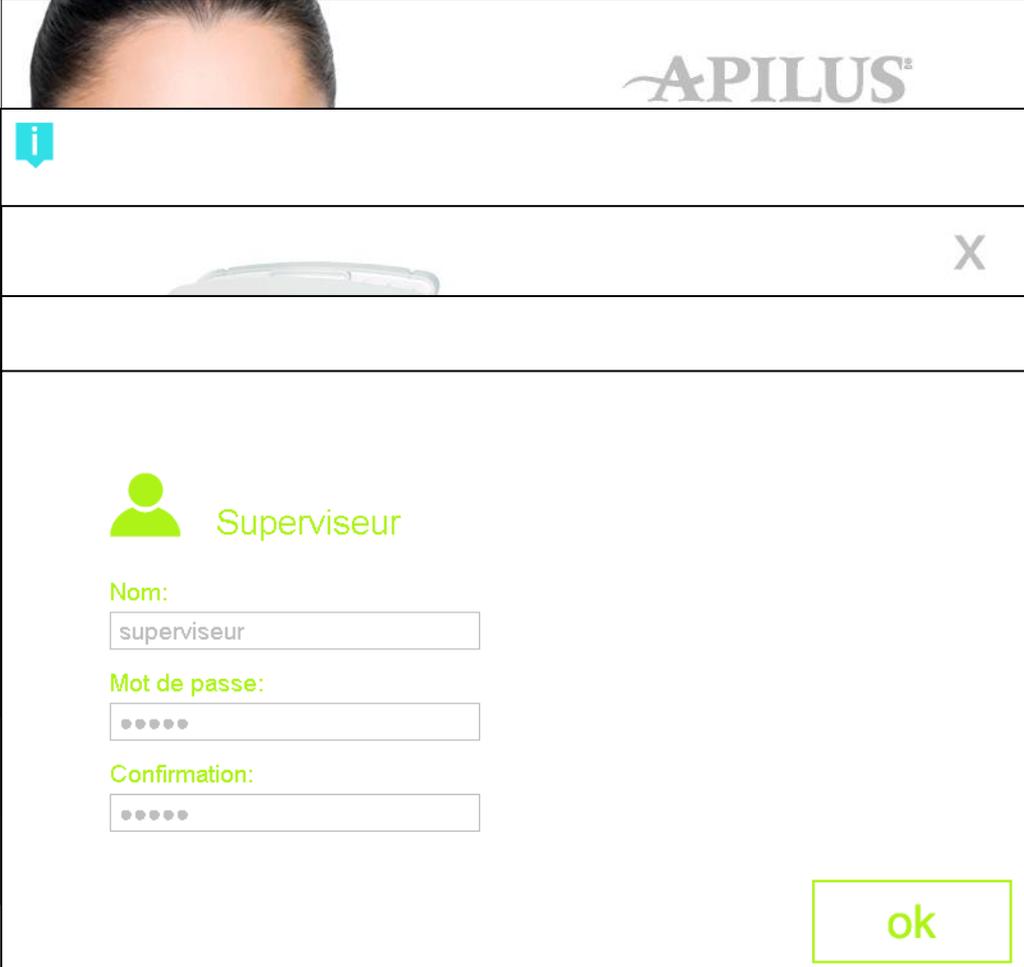

The screenshot shows the APILUS configuration interface. At the top, there is a header with the APILUS logo and a blue information icon. Below the header, there is a close button (X). The main content area displays a green person icon and the text "Superviseur". Below this, there are three input fields: "Nom:" with the value "superviseur", "Mot de passe:" with five dots, and "Confirmation:" with five dots. A green "ok" button is located at the bottom right of the screen.

Écran d'accueil et modes de traitement

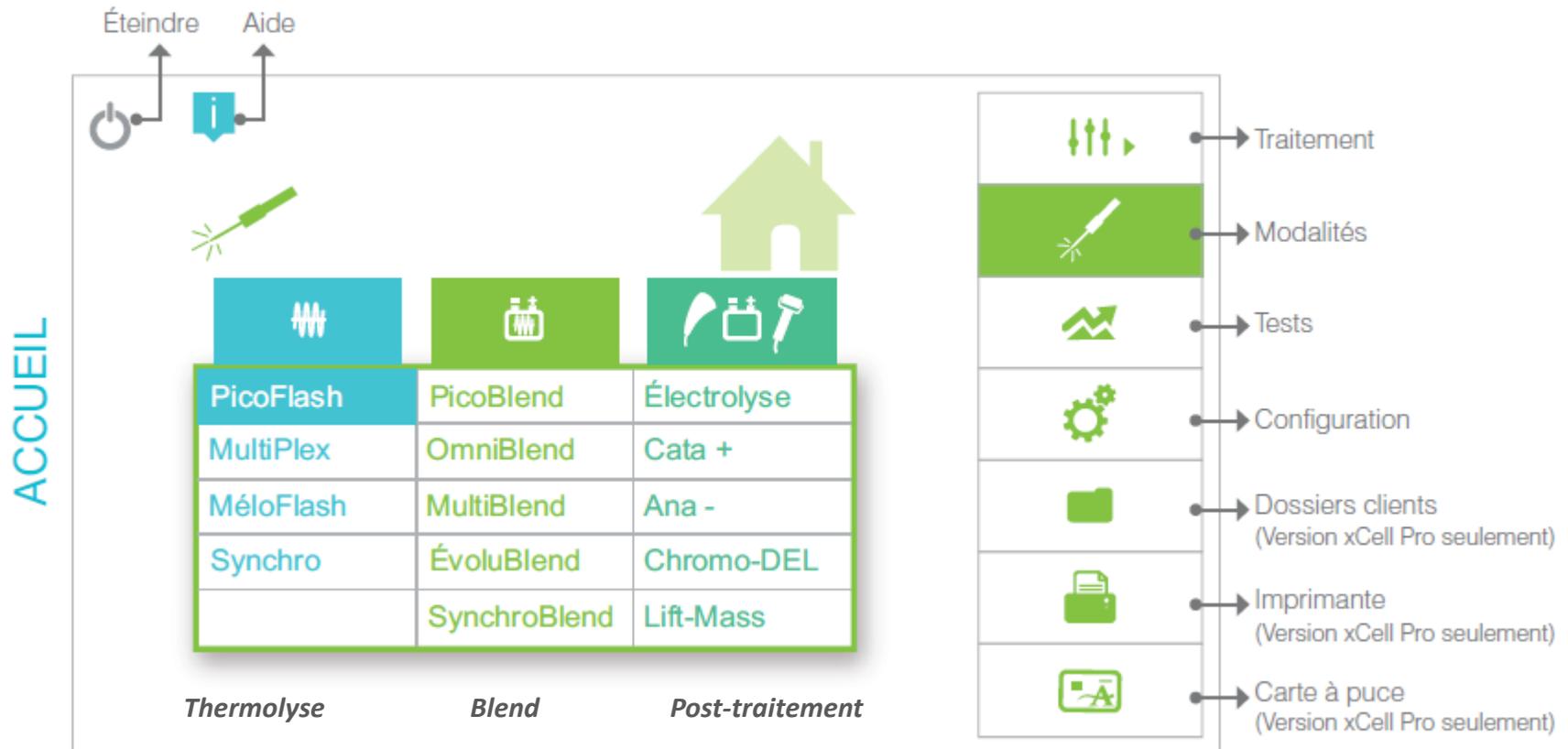


Synchro, SynchroBlend et EvoluBlend

- Inclus avec xCell Pro
- En option pour xCell Pur

- **La thermolyse ou le courant haute-fréquence** est un **courant alternatif** qui change constamment de polarité.
- Il produit **une attraction et une répulsion constante des atomes** à l'intérieur des tissus.
- Ces **mouvements successifs** engendrent une friction dans les structures anatomiques environnantes créant une **chaleur et provoquant la destruction des cellules responsables de la croissance des poils.**

LOI DE COULOMB

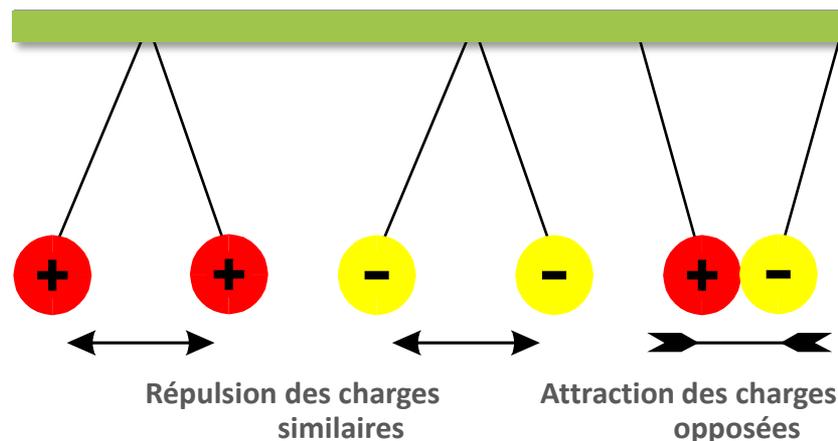

PicoFlash

EL 94 UL --

0

11:49
31 mars
superviseur

00:00:00


Lèvre -3-

A | 3

Activé

Dossiers


0.026 s 60 % 1 X

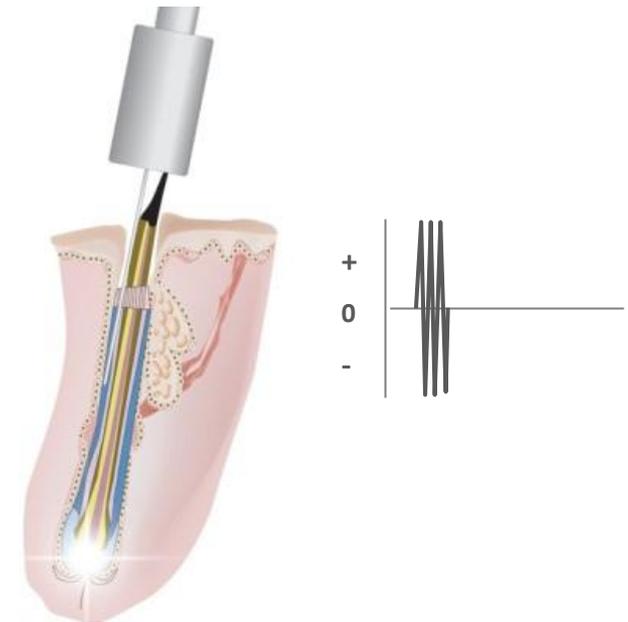

- Modalité HF 27.12 MHz de quelques **millièmes de seconde** avec une intensité élevée
- Coagulation ultra-rapide concentrée à l'extrémité du filament pour de meilleurs résultats
- Recommandé avec filaments isolés pour un confort inégalé
- Idéal pour tous types de poils, mais surtout les poils superficiels et fins

Technique à 2 impulsions

- Application de 2 impulsions à 2 endroits différents
- Destruction concentrée à la papille et au bulge
- Il est obligatoire d'utiliser des filaments isolés
- Technique idéal pour poils profonds

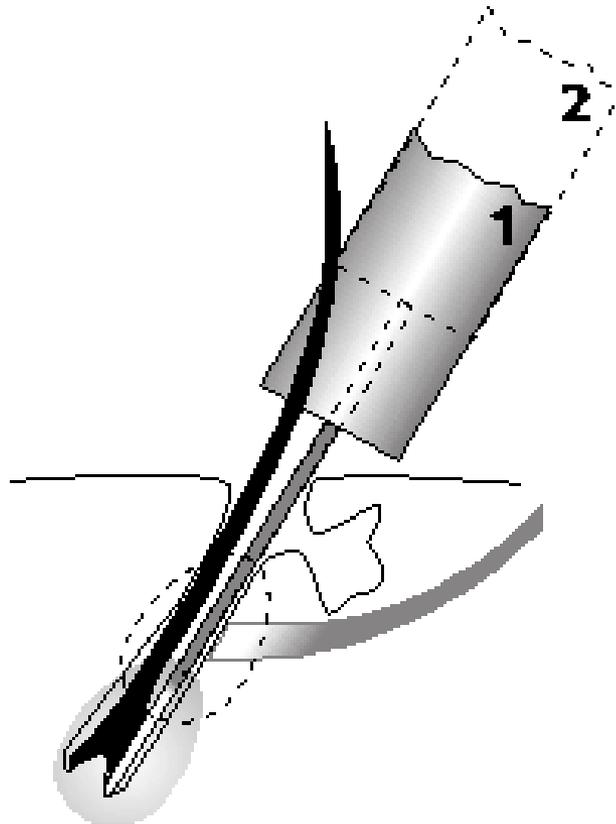


PicoFlash à 2 impulsions

- La durée de l'impulsion est automatiquement réduite pour une sécurité et un confort accrus.

Délai entre chaque impulsion

- Ajustable en fonction de la vitesse de travail de l'opératrice

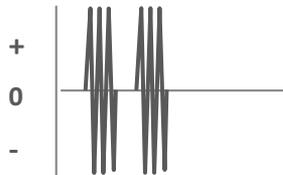

Écran de configuration de l'appareil PicoFlash. L'interface est divisée en deux sections principales, chacune avec un titre 'PicoFlash' et des paramètres ajustables.

Section supérieure (Mode 1) :

- Titre : PicoFlash
- Paramètres : EL 119, UL --
- Statut : 0
- Horloge : 11:23 AM August 10th super
- Timer : 00:00:00
- Mode : Underarm

Section inférieure (Mode 2) :

- Titre : PicoFlash
- Paramètres : 0.50s, EL 180, UL --
- Statut : 0
- Horloge : 11:23 AM August 10th super
- Timer : 00:00:00
- Mode : *Underarm - 3-
- Paramètres : A | 3 IBL
- Statut : Enabled
- Mode : Files

Le mode inférieur présente également un panneau de réglage central avec un indicateur de durée (0.022 s), un pourcentage (64 %) et un nombre d'impulsions (2 X). Trois curseurs verticaux sont positionnés sous ces valeurs pour permettre l'ajustement.

Nouveau MéloFlash

APILUS®


The screenshot displays the MéloFlash control interface. At the top, there are three input fields: '0.50s', '221', and '--'. Below these, a table shows the following parameters:

⚡		
0.10 s	47 %	1 X

Each parameter in the table has a vertical double-headed arrow below it, indicating it is adjustable. To the right of the table is a sidebar menu with icons and labels: a home icon, a clock icon with '00:00:55', a hair icon with 'Aisselle - 5 -', a pencil icon with 'A | 3 INO', an eye icon with 'Active', and a folder icon with 'Dossiers'. The time '13h52' and date '17 décembre' are also visible.



- Modalité HF 27.12 MHz disponible sur l'Apilus xCell seulement
- Durée de quelques centièmes de seconde
- Une durée plus longue, mais une intensité plus faible que le PicoFlash
- Technique idéale pour poils profonds et poils tenaces en phase télogène

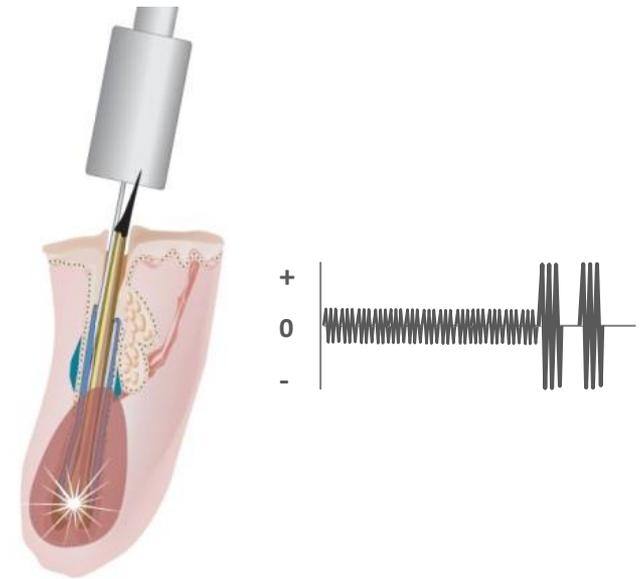

Combine une thermolyse lente + une impulsion PicoFlash 27.12 MHz

- Le processus commence avec un réchauffement à faible intensité d'une durée relativement longue (0.5 à 2 sec.) qui produit une porosité et conductivité dans le follicule
- Se termine avec une impulsion PicoFlash pour une concentration maximale à la papille
- Excellent pour les poils forts et légèrement déformés

Multiplex à 2 impulsions

Méthode de déplacement du filament avec deux impulsions MultiPlex

- Avec mouvement du bulbe vers le bulge ou vice versa
- La durée des impulsions est automatiquement réduite
- Il est obligatoire d'utiliser des filaments isolés
- Technique idéale pour poils profonds

Délai ajustable entre chaque impulsion en fonction de la vitesse

- Destruction plus localisée dans la région de la papille et du bulge





Synchro (breveté)

APIPLUS®

Picopulses multiples ultrarapides produisant une microcoagulation

- Picopulses HF 27.12 MHz de .002 à .005s
- Temps de relaxation thermique entre chaque picopulse de .001 à .004s
- Meilleure distribution de la chaleur
- Mouvement synchronisé bulbe-bulge
- Peut détruire toutes les cellules germinatives situées dans les deux tiers de la partie inférieure du follicule
- Il est important d'utiliser un filament ISOGARD
- Généralement pour poils tenaces

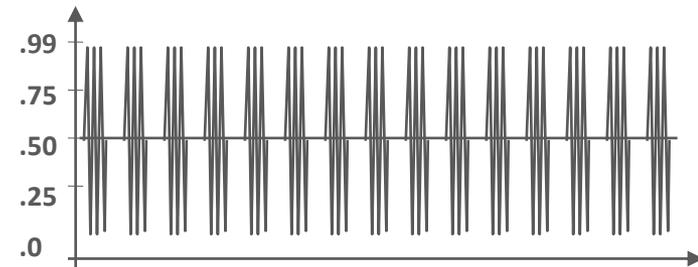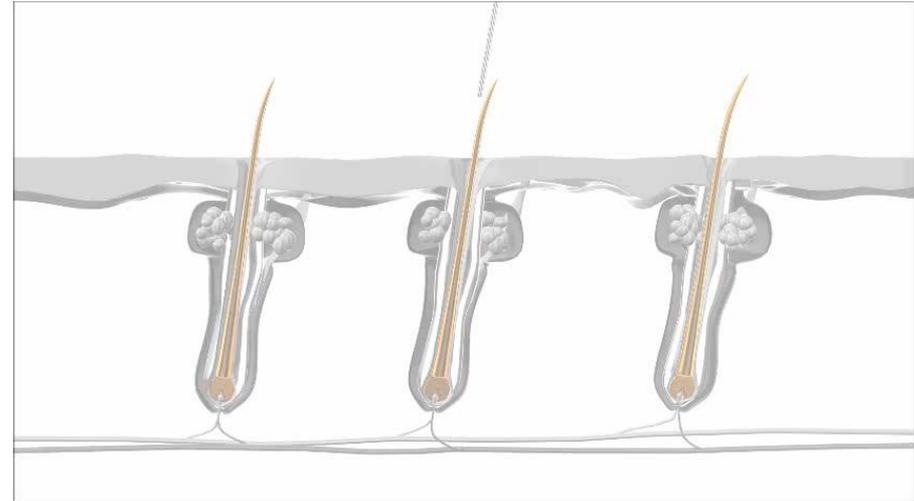

Synchro 27MHz (Breveté)

Le facteur synchro modifiable

- Picopulses et durée de relaxation thermique ajustables
- 2/1 - plus chaud : pulse .002s / relax .001s
- 3/2 - pulse 0.003s / relax .001s
- 4/3 - pulse 0.004s / relax .003s
- 5/4 - moins chaud : pulse .005s / relax .004s
- Exclusif à l'Apilus xCell
- Apilus Platinum : toujours 2/1

The screenshot displays the 'Synchro' control interface. At the top, there are input fields for 'EL' (455) and 'UL' (—). The main display area shows a green bar with a lightning bolt icon and a τ symbol. Below this bar, three adjustable parameters are shown: '0.21 s', '57 %', and '2/1'. Each parameter has a vertical double-headed arrow with a circular slider. A home icon is visible in the top right corner, and a timer shows '13h54' and '17 décembre'. A sidebar on the right contains icons for a stopwatch (00:03:02), a pencil (Aisselle - 5 -), a pen (A | 3 IBL), an eye (Active), and a folder (Dossiers). A lock icon is present in the bottom left corner.

Modalités thermolyse

versus le type de poil


- PicoFlash
 - Poils superficiels, poils faciaux, poils en phase télogène, clientes sensibles

- MéloFlash
 - Poils profonds
 - Poils en phase télogène tenaces

- MultiPlex
 - Poils légèrement déformés
 - Poils profonds
 - Poils en phase télogène tenaces
 - Poils généralement difficiles

- Synchro
 - Poils profonds
 - Poils en phase télogène tenaces
 - Poils généralement difficiles

- Technique à 2 impulsions
 - Poils profonds

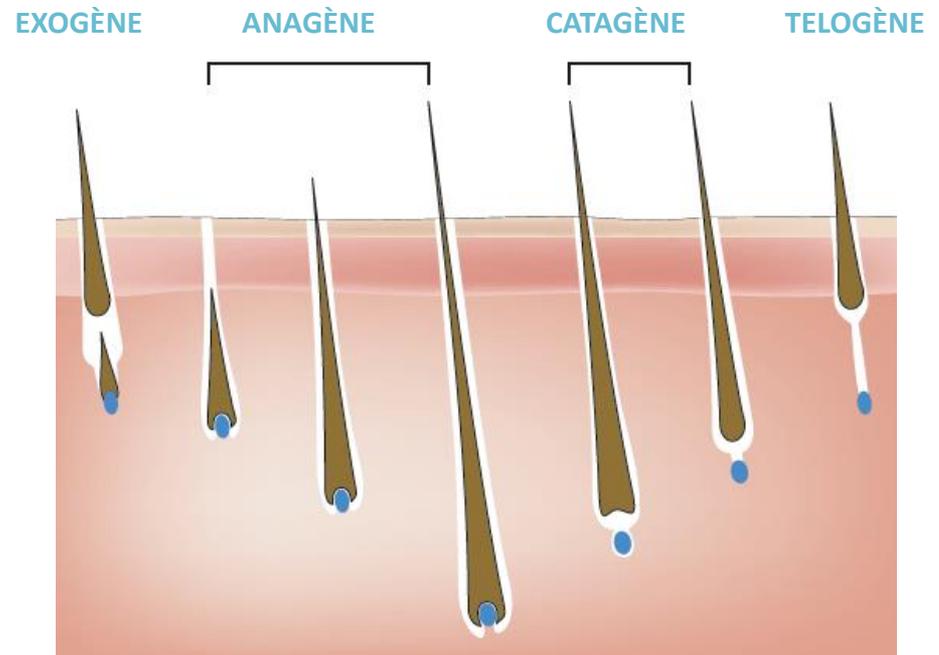

Ajustement des paramètres HF

Pour modifier les paramètres, vous avez deux possibilités :

- Glissez la puce sur la flèche vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le chiffre que vous souhaitez modifier et un clavier apparaîtra. Utilisez les numéros sur le clavier pour modifier les paramètres et appuyez sur OK.
- Une fois que vous êtes prête à travailler, appuyez sur la pédale ou sur le cadenas pour confirmer les paramètres.

The screenshot displays the MultiPlex control interface. At the top, it shows 'MultiPlex' with a timer set to 0.50s, 'EL' at 236, and 'UL' at --. Below this, there are three main sections: 'HF rapide' (1.63 s, 7%), 'HF lente' (0.037 s, 65%), and 'Impulsions' (1 X). Each section has a vertical slider with a blue or green knob. A red padlock icon with a question mark is located at the bottom left, with a red arrow pointing to it, indicating a confirmation step. On the right side, there is a home icon, the time 13h51, the date 17 décembre, and a list of settings: a timer at 00:00:17, 'Aisselle - 5 -', 'A | 3 INO', 'Active', and 'Dossiers'.

Informations générales

- Si le poil est profond, vous pouvez augmenter la durée
- Si le poil est peu profond, il est préférable d'augmenter le % de l'intensité

Calcul du niveau d'énergie (E.L.)

- E.L.= Quantité de chaleur produite par le courant HF dans le follicule
- Se référer au tableau E.L.


The screenshot shows the 'Synchro' treatment screen. At the top, there are input fields for 'EL' (455) and 'UL' (---). Below this, a green bar displays '0.21 s', '57%', and '2/1' with a lightning bolt icon and a 'T₀' symbol. Three vertical double-headed arrows indicate the treatment area. On the right, a sidebar shows a home icon, the time '13h54' on '17 décembre', a timer '00:03:02', and a list of items: 'Aisselle - 5 -', 'A | 3 IBL', 'Active', and 'Dossiers'. A lock icon is visible in the bottom left corner.

Niveau d'énergie E.L. = Temps (sec.) x intensité² (%)


POIL	E.L. non-isolé	E.L. IBL isolé	E.L. ITH isolé
FIN	110 E.L.	90 E.L.	75 E.L.
MOYEN	260 E.L.	220 E.L.	185 E.L.
FORT	430 E.L.	365 E.L.	315 E.L.

Blend

- Le courant **HF réchauffe** les tissus pour transformer la substance intercellulaire en **masse poreuse**.
- La porosité favorise la pénétration de la **soude caustique** produite par le **courant galvanique** dans les espaces folliculaires.
- Le courant galvanique requiert un follicule humide pour produire la lessive (**phase anagène**).
- L'électrode-plaque ou l'électrode-barre et une éponge humide sont nécessaires; placez-les près de l'endroit à traiter et en contact avec la peau de la cliente.
- Vérifiez les contre-indications au GLV.

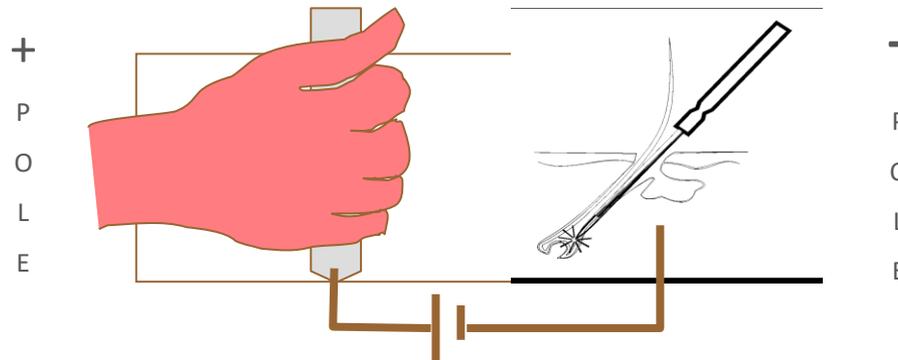

- Superpose des impulsions HF 27.12 MHz au courant galvanique à des intervalles réguliers.
- Le courant HF est à faible intensité pour prévenir la déshydratation du follicule.

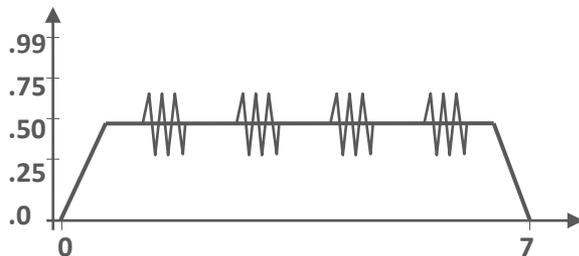

PicoBlend
EL 116 UL 38

🔋		⚡		📡
8 s	0.48 mA	0.594 s	7 %	4 X

14h15
17 décembre

🕒 00:00:00

🔪 Aisselle - 5 -

✍️ A | 3 IBL

👁️ Active

📁 Dossiers

🔒

↑
↓

↑
↓

↑
↓

↑
↓



↑
↓

Nouveau SynchroBlend

APILUS®

Superpose plusieurs picopulses HF ultrarapides 27.12 MHz à un courant galvanique

- Durée des picopulses de .002 à .005s
- Temps de relaxation thermique entre chaque picopulse de .001 à .004s
- Meilleure distribution de la chaleur dans les tissus
- Mouvement synchronisé bulbe-bulge-bulbe-bulbe

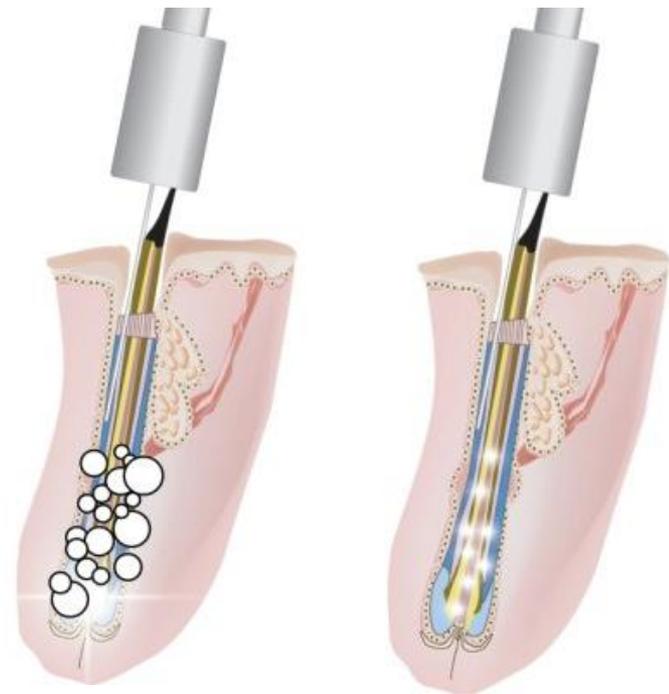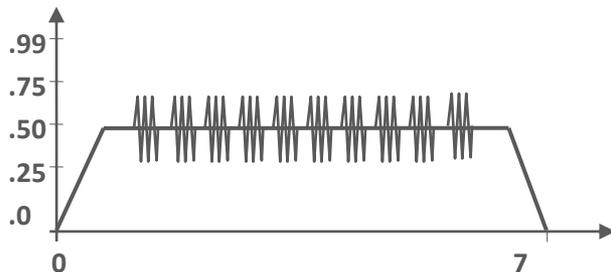



Nouveau SynchroBlend

- Picopulses et durée de relaxation thermique ajustables (facteur synchro).
- Excellente alternative au Blend à impulsions régulier.
- Il est important d'utiliser un filament IsoBlend.

The screenshot displays the SynchroBlend control interface. At the top, a green header bar contains the text "SynchroBlend" and a waveform icon. To the right of the header, two white boxes show "EL 186" and "UL 38". Below the header, a central control area features two rows of parameters. The first row has a green background and contains a battery icon, a lightning bolt icon, and a τ_{rel} icon. The second row shows the values "8 s", "0.48 mA", "2 %", and "5/4". Below these values are four vertical sliders with green circular knobs and double-headed arrows. A grey padlock icon is visible in the bottom left corner of the interface. On the right side, a sidebar contains a home icon, the time "14h17" and date "17 décembre", a timer showing "00:01:39", a "7/5" icon with "Aisselle - 5 -", a pencil icon with "A | 3 IBL", an eye icon with "Active", and a folder icon with "Dossiers".

Omniprésence des deux courants


- Application simultanée des courants galvanique et HF
- L'Apilus calibre l'intensité du courant HF nécessaire selon l'intensité du courant GLV
- Confortable et facile d'utilisation
- Excellente alternative au Blend à impulsions

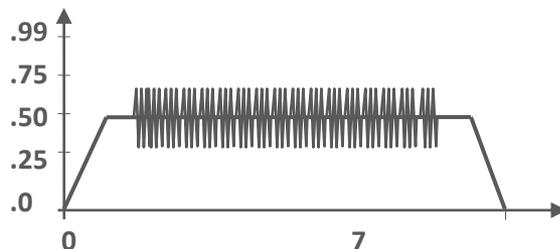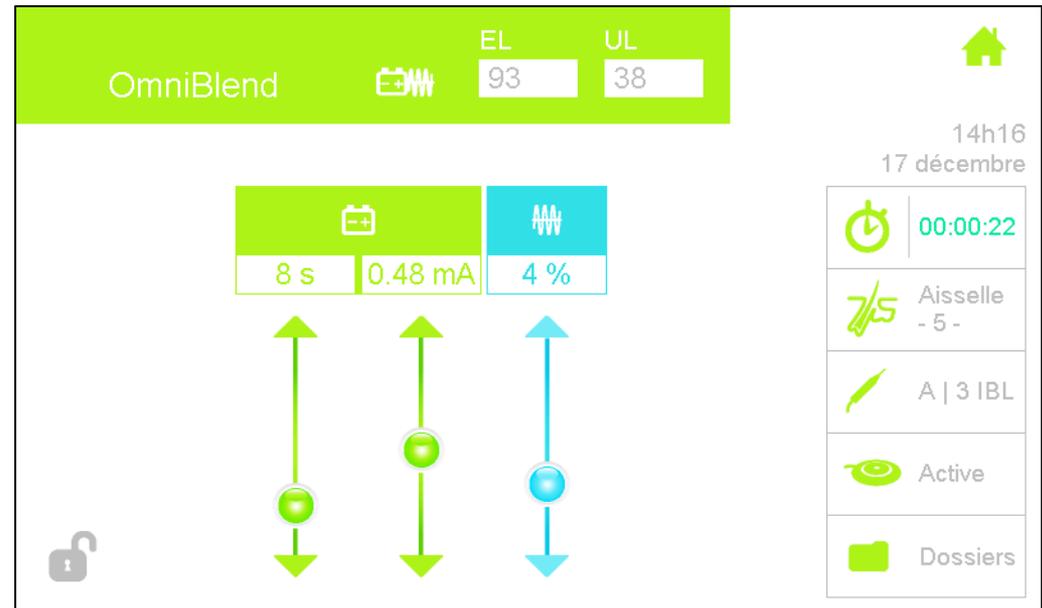

OmniBlend - paramètre HF caché
Max. 8 %

MultiBlend

- Combine la modalité OmniBlend avec une impulsion PicoFlash à la fin du processus
- Pour poils très difficiles en phase anagène


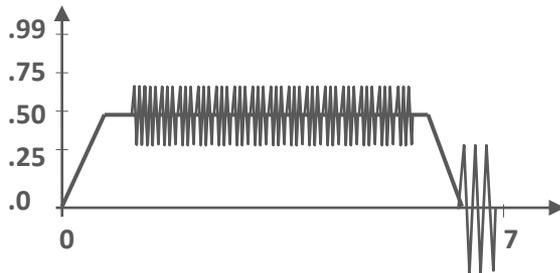


L'interface utilisateur de l'appareil MultiBlend est présentée. Elle est divisée en plusieurs sections :

- Barre supérieure (vert) :** Affiche "MultiBlend", un pictogramme de grille, et les valeurs "EL 107" et "UL 38".
- Barre de paramètres (bleu) :** Contient des pictogrammes de batterie, de grille et de foudre. Les valeurs sont : "8 s", "0.48 mA", "2 %", "0.030 s" et "53 %".
- Contrôles :** Cinq curseurs à double sens (bleu et vert) permettent d'ajuster les paramètres. Un pictogramme de verrouillage est visible en bas à gauche.
- Barre latérale droite (bleu) :** Affiche l'heure "14h16", la date "17 décembre", un chronomètre à "00:00:48", et des menus pour "Aisselle - 5 -", "A | 3 IBL", "Active" et "Dossiers".

Application simultanée d'une rampe progressive de courant galvanique et d'un courant proportionnel HF 27.12 Mhz :


- Similaire au test de tolérance, mais avec un courant HF et une montée plus rapide.
- Idéal pour clientes sensibles avec poils déformés en phase anagène.

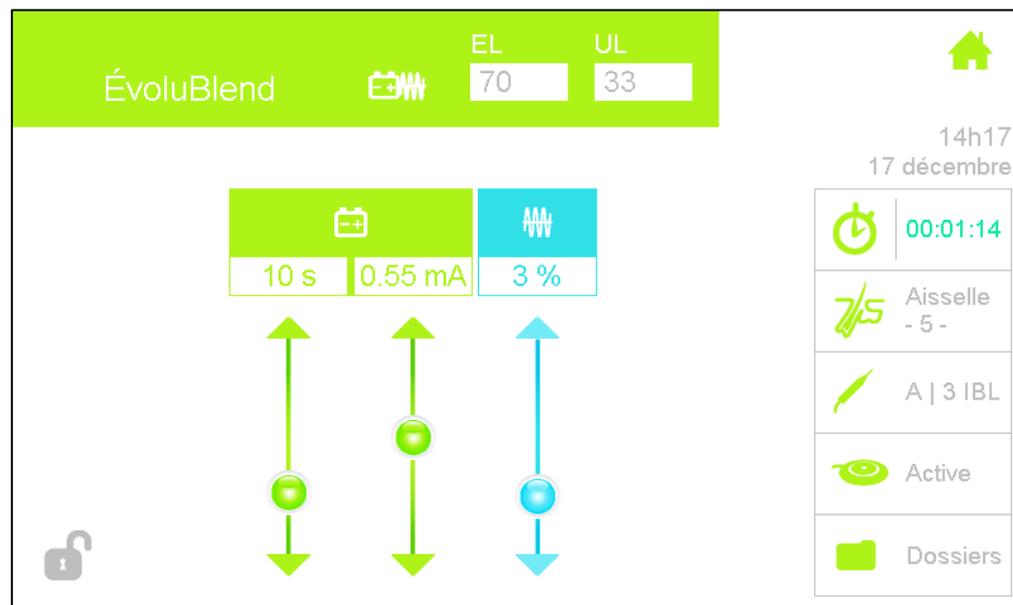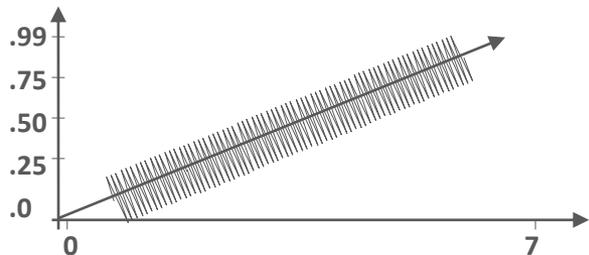

Électrolyse


- L'électrolyse utilise un **courant galvanique** pur pour produire une réaction biochimique dans le follicule pileux.
- Celle-ci a perdu de sa popularité parce que le processus est plus long que les modalités Blend.
- Vous devez sélectionner le mode PicoBlend à impulsions et saisir 0 impulsion pour couper tout courant thermolyse.

The screenshot displays the APILUS control interface. At the top, the mode is set to 'PicoBlend'. Below this, there are two rows of settings. The first row shows 'EL' (Electrolysis) set to 116 and 'UL' (Ultra-Low) set to 38. The second row shows '8 s' (pulse width), '0.48 mA' (pulse amplitude), '0.594 s' (pulse period), '7 %' (duty cycle), and '4 X' (number of pulses), with the '4 X' value circled in red. Below these settings are five vertical sliders with green knobs, each with a double-headed arrow indicating adjustability. On the right side of the interface, there is a home button, the time '14h15', the date '17 décembre', a timer set to '00:00:00', and a list of active treatments: 'Aisselle - 5 -', 'A | 3 IBL', 'Active', and 'Dossiers'.

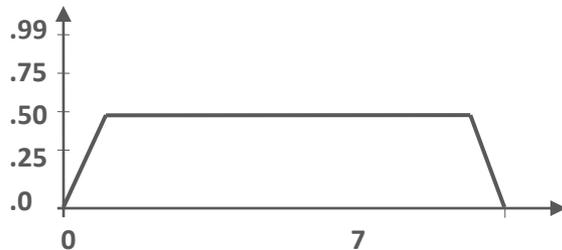

Modalités versus le type de poils

- Techniques Blend
 - Pour poils déformés et profonds dans la phase anagène.
- Blend à impulsions
 - Pour tous les cas « normaux »
- OmniBlend
 - Pour tous les cas « normaux »
 - facile à utiliser et confortable
- MutiBlend
 - Pour poils forts et tenaces
- SynchroBlend
 - Pour poils forts et tenaces
- ÉvoluBlend
 - Clientes sensibles

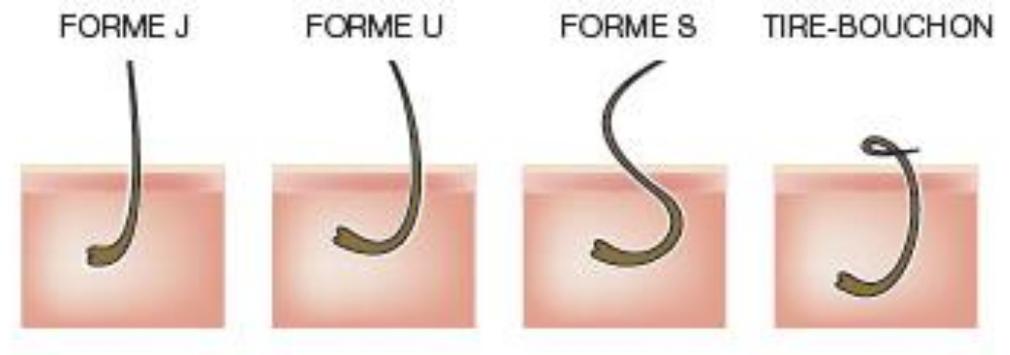

Ajustement des paramètres Blend/GLV

Pour modifier les paramètres, vous avez deux possibilités :

- Glissez la puce sur la flèche vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le chiffre que vous souhaitez modifier et un clavier apparaîtra. Utilisez les numéros sur le clavier pour modifier les paramètres et appuyez sur OK.


The screenshot shows the PicoBlend control interface. At the top, there is a green header with 'PicoBlend' and a battery icon. To the right, there are two input fields: 'EL' with the value '116' and 'UL' with the value '38'. Below this, there are three main sections: 'GLV', 'HF', and 'Impulsions'. The 'GLV' section has a battery icon and two values: '8 s' and '0.48 mA'. The 'HF' section has a lightning bolt icon and two values: '0.594 s' and '7 %'. The 'Impulsions' section has a pulse icon and a value: '4 X'. Below these sections are five vertical sliders with green knobs and double-headed arrows, indicating adjustable parameters. On the right side of the interface, there is a sidebar with a home icon, the time '14h15', the date '17 décembre', a timer set to '00:00:00', a patient name 'Aisselle - 5 -', a treatment name 'A | 3 IBL', a status 'Active', and a folder icon labeled 'Dossiers'.

Informations générales

- Utilisez le test de tolérance pour mesurer l'intensité galvanique que votre cliente peut tolérer, puis ajustez la durée selon le tableau UL.
- Vérifiez les contre-indications au GLV.

Charte des unités de lessive (U.L.)

- Unités de lessive = quantité de soude caustique produite par le courant GLV dans le follicule pileux
- Se référer au tableau UL
- Appuyez sur le chiffre pour le modifier au besoin
- N'affecte pas l'intensité (mA), mais modifie le temps de passage du GLV

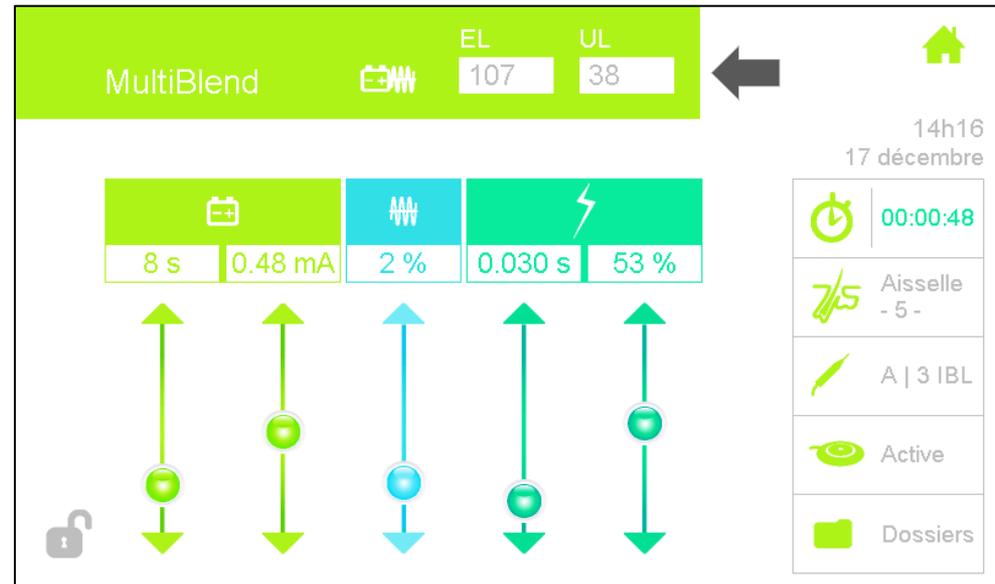


$$U.L. = \text{Temps} \times (\text{mA} \times 10)$$

POIL	Fin	Moyen	Fort	Extra-Fort
U.L.	20	40	60	80


Paramètres en mode Blend

- Courant galvanique en premier ou courant HF en premier en mode Blend.
- Généralement, le courant galvanique est utilisé en premier.

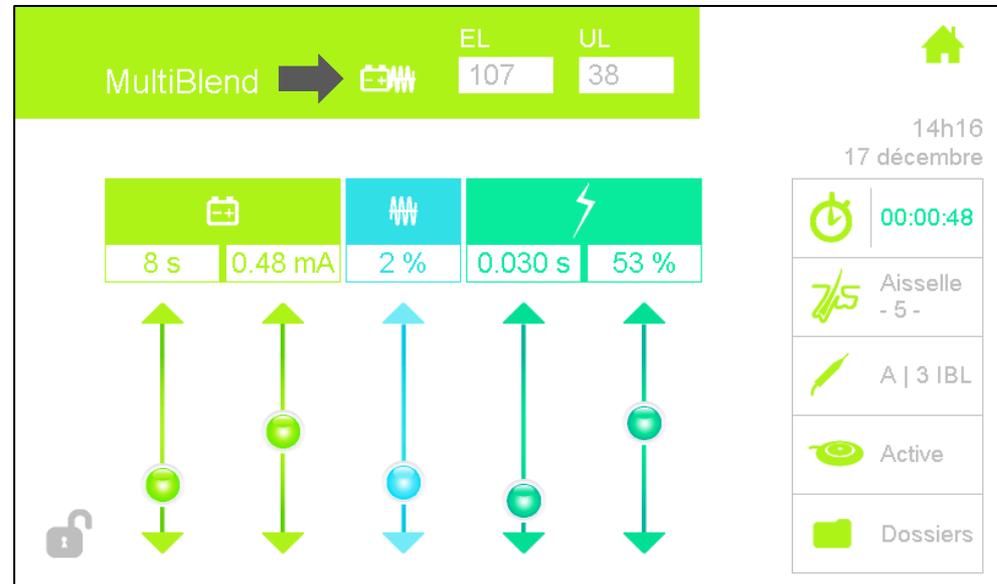

Cataphorèse / Ionisation positive +


- Soins post-épilatoire
- Action calmante et diminution des rougeurs
- Germicide par son action acide
- Vasoconstricteur
- Action astringente sur les sécrétions sébacées
- Application de 3 à 5 minutes avec un produit ionisable apaisant à base d'eau avec pôle +

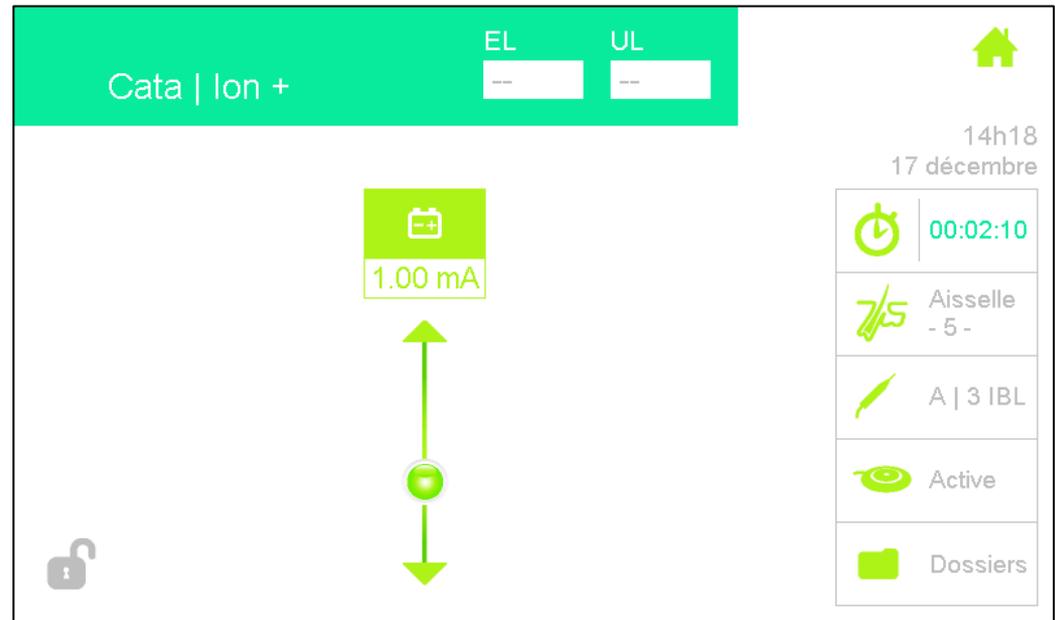

Anaphorèse

Anaphorèse / Ionisation -

- Nettoyage en profondeur (traitement esthétique)
- Action alcaline
- Vasodilatation (hyperémie), activation de la circulation sanguine et lymphatique
- Dilatation des pores
- Élimination d'excès de sébum
- Application de 2 à 3 minutes avec un produit ionisable apaisant à base d'eau avec pôle -

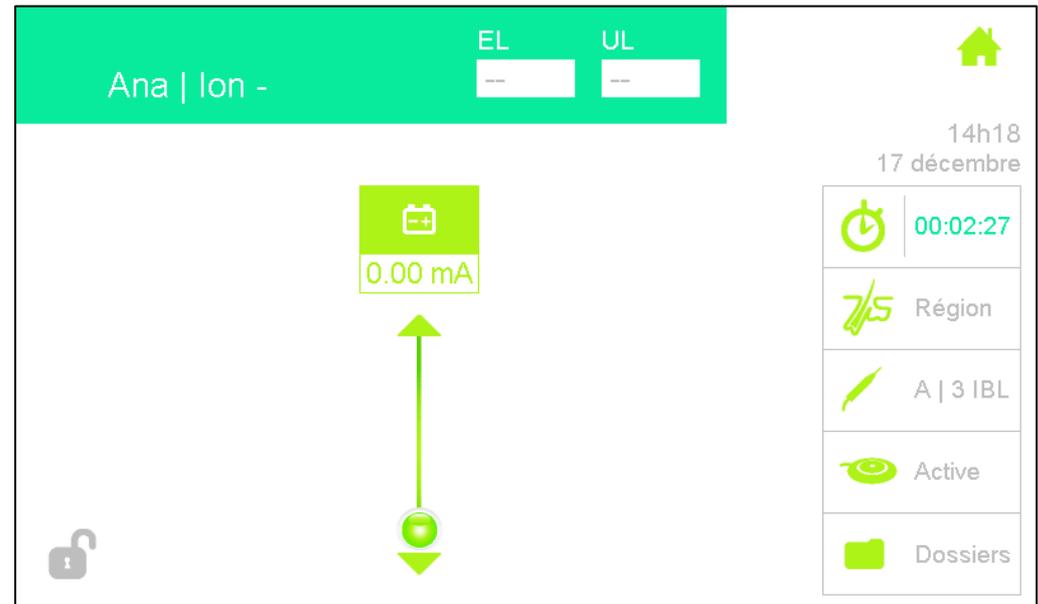


Non disponible aux É.U.

Ajustement des paramètres cata/ana


Pour modifier les paramètres, vous avez trois possibilités :

- Glissez la puce sur la flèche vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le chiffre que vous souhaitez modifier; utilisez les numéros sur le clavier pour modifier les paramètres et appuyez sur OK.
- Vous pouvez augmenter rapidement l'intensité en appuyant sur la pédale.
- Si vous avez sélectionné un programme d'épilation, l'Apilus vous suggérera une intensité de courant GLV pour la cataphorèse seulement, et ce, selon la région.

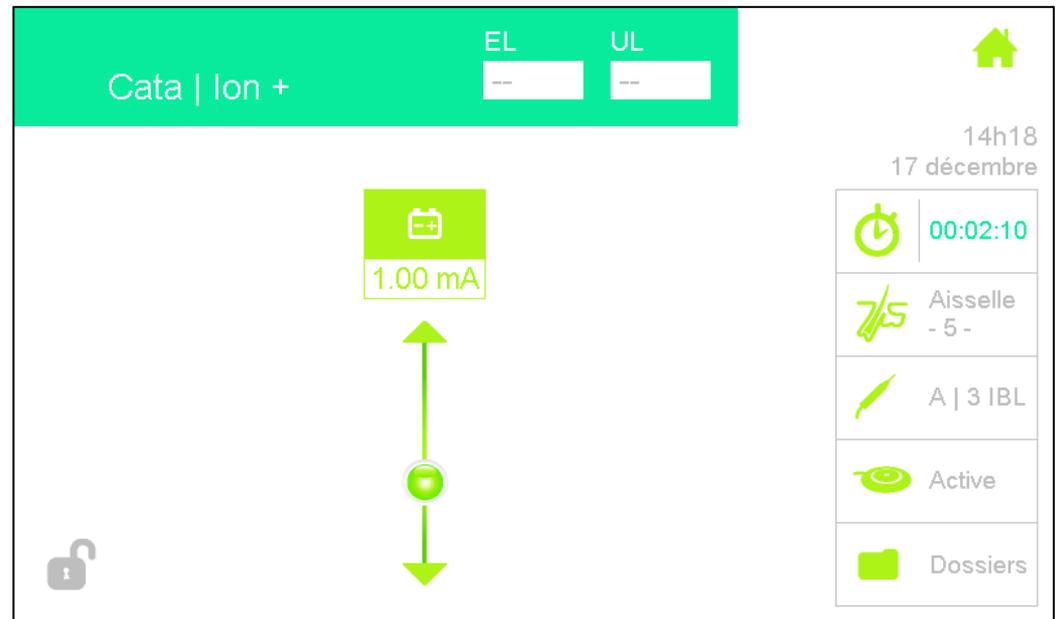


Ajustement des paramètres cata/ana

- L'intensité peut varier selon la tolérance de la cliente, la région et la taille de l'électrode.
- La cliente devrait sentir un picotement confortable. De plus, une sensation de métal dans la bouche peut être ressentie.
- Vérifiez les contre-indications au GLV.
- L'électrode-plaque ou l'électrode-barre et une éponge humide sont nécessaires; placez-les près de la région à traiter et en contact avec la peau de la cliente.

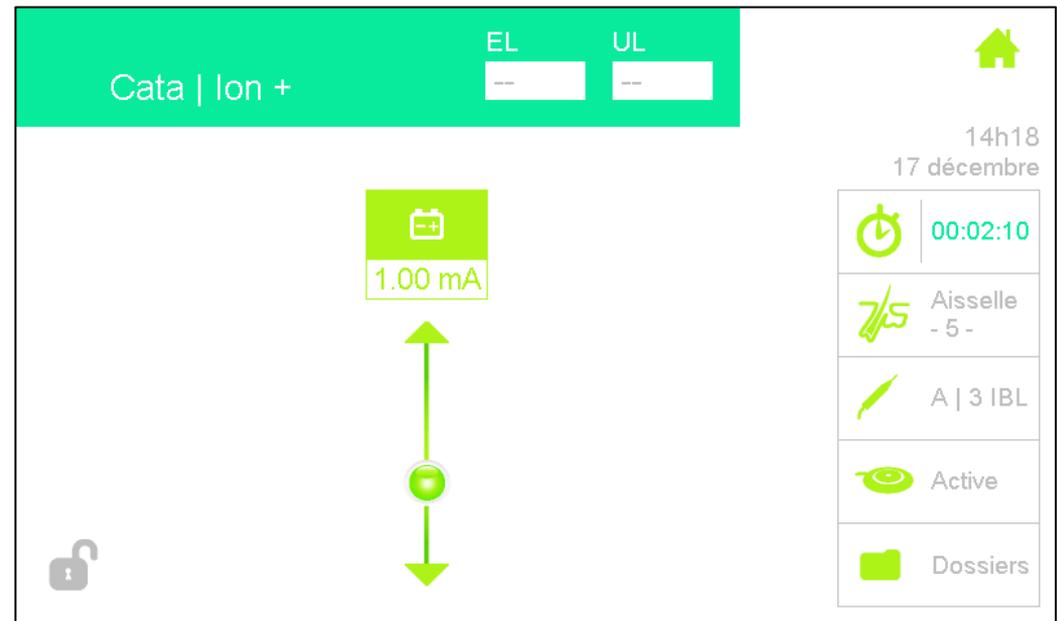



Description de l'écran de traitement

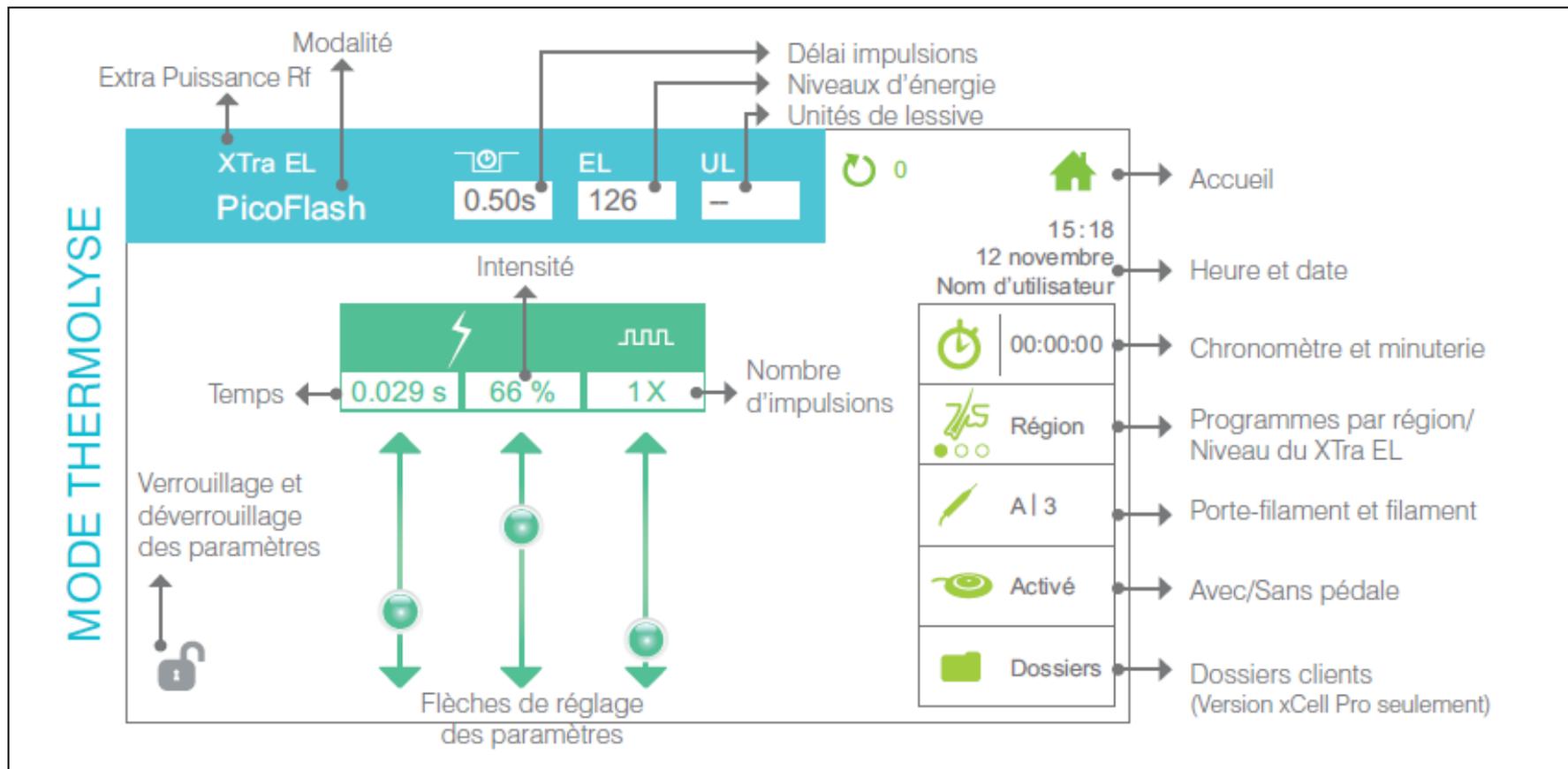

Jusqu'à 29,700 programmes :

- Modalités (jusqu'à 9)
- Régions (11)
- Sexe (F-M)
- Grosseur du poil (0 – 9)
- Type de filament (inox, isogard, isoblend)
- Taille du filament (1-5)

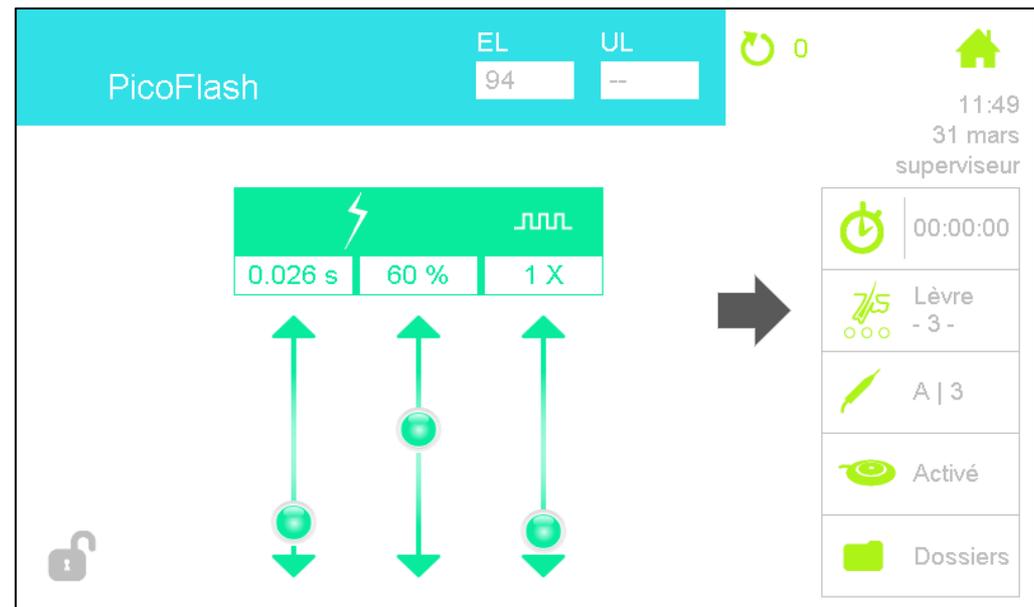

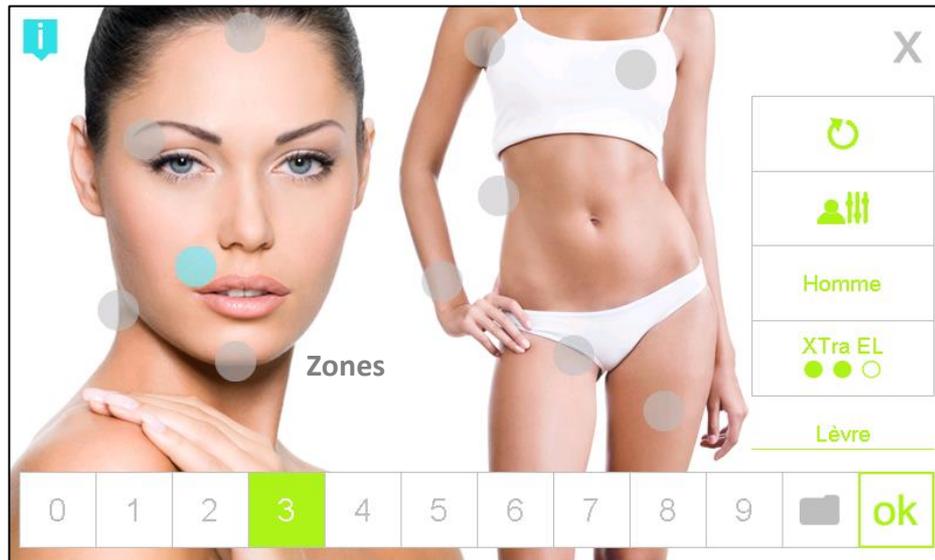

Grossueur des poils


- Remettre à zéro la sélection
- Programmes pour utilisateurs
- Programmes pour hommes
- Niveaux d'énergie E.L. supplémentaire
- Région sélectionnée
- Bouton de confirmation

Programmes selon la grosseur du poil	
NOMBRE	POIL
0 à 3	Fin
4 à 6	Moyen
7 à 9	Fort




Écran de programmes des utilisateurs

- Possibilité de créer 10 programmes par modalité.
- Fixez premièrement vos paramètres sur l'écran de traitement selon la modalité choisie.
- Puis, allez à l'écran de programmes des utilisateurs.
- Sélectionnez un numéro libre, nommez votre programme (inclure la modalité dans le nom) et appuyez sur « sauvegarder programme ».
- Pour charger un programme, allez à l'écran de programmes des utilisateurs, trouvez le programme souhaité en appuyant sur les numéros, puis appuyez sur la touche « charger programme ».

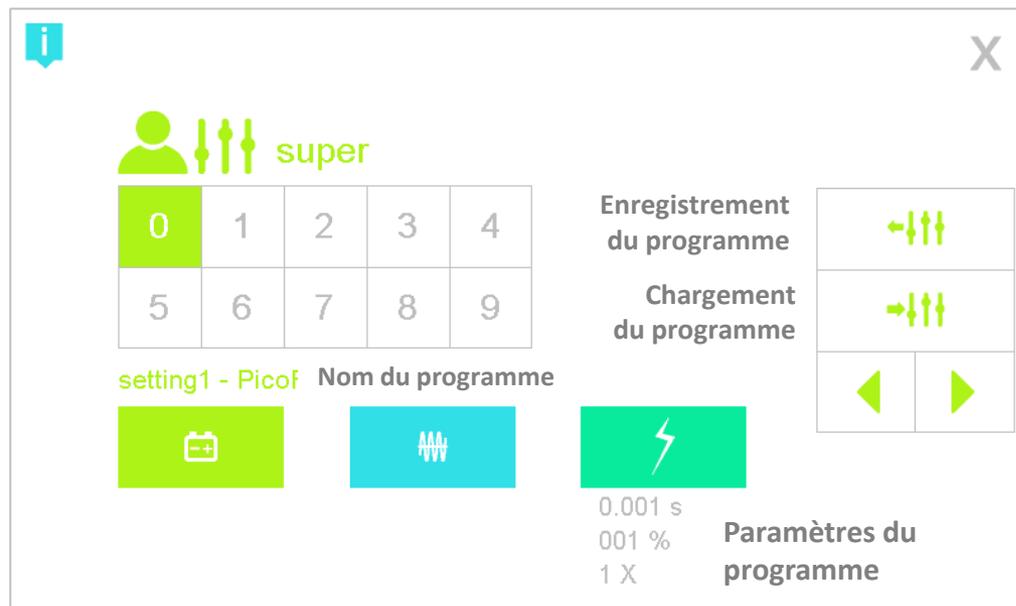




Sélection du porte-filament

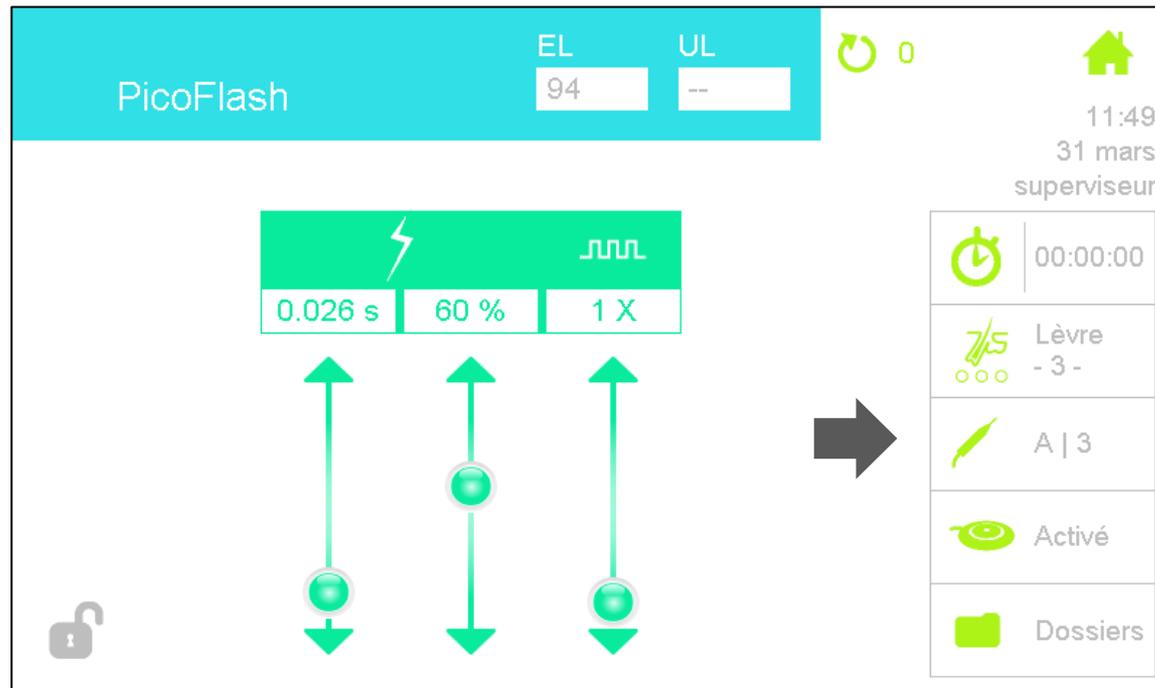

La fonction APIL (Artificial Intelligence Pro-Tec Levels) convertit les programmes selon le type et la taille du filament choisi


Sélection du porte-filament

- Type de filament (inox, isogard, isoblend);
- Taille du filament (1-5);
- Porte-filament actif A ou B;
- Les paramètres varieront selon le type et la taille de filament.

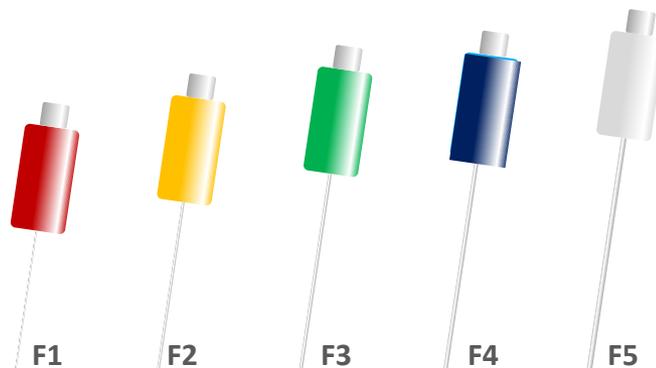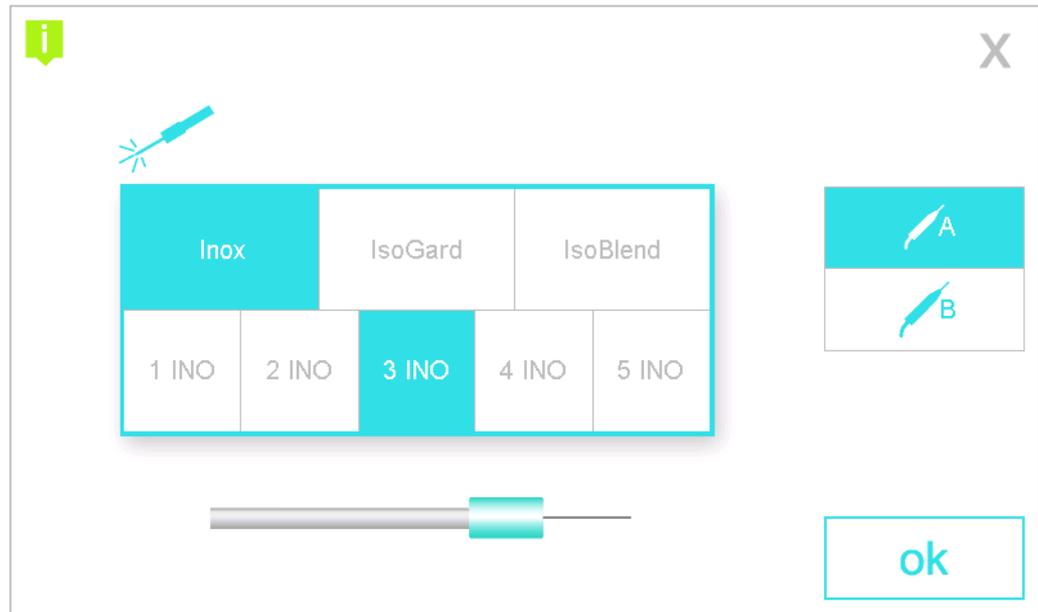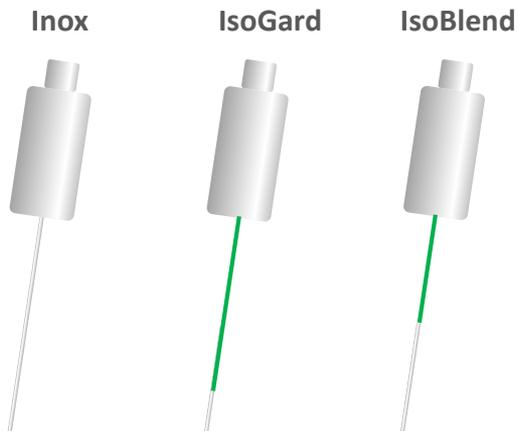

Filaments isolés vs non-isolés


Non-isolés

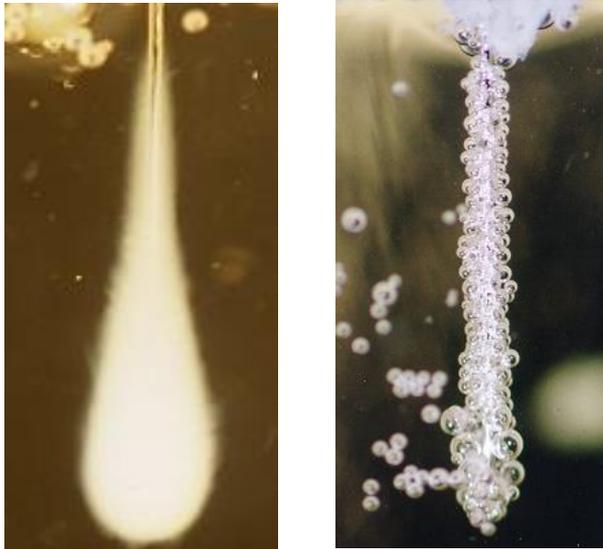

Énergie dispensée tout le long du filament

- Perte d'énergie
- Paramètres plus élevés
- Moins confortables
- Plus de risques de réactions cutanées

ITH & IBL isolés

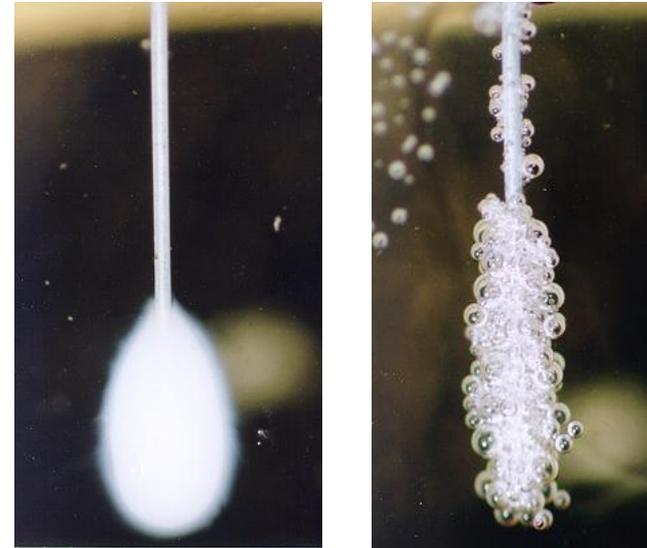



Énergie concentrée sur la partie non-isolée

- Paramètres moins élevés
- Améliore le confort
- Moins de réactions cutanées

Paramètres généraux - Mode auto


Ajustement de la durée en mode auto

- Un délai est nécessaire quand on utilise le fonctionnement sans pédale.
- Il représente la durée avant que le courant soit appliqué à partir du moment que le filament touche la peau.
- Doit être ajusté selon votre cadence d'insertion naturelle.
- L'électrode-plaque ou l'électrode-barre et une éponge humide sont nécessaires en mode auto.

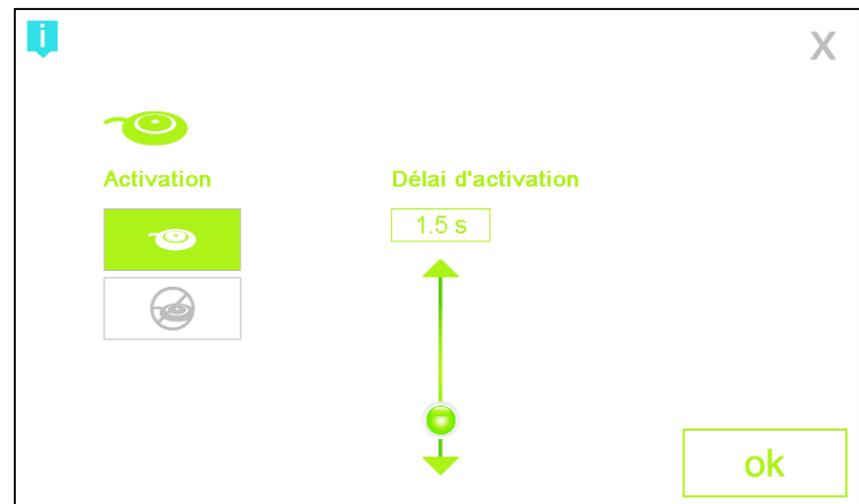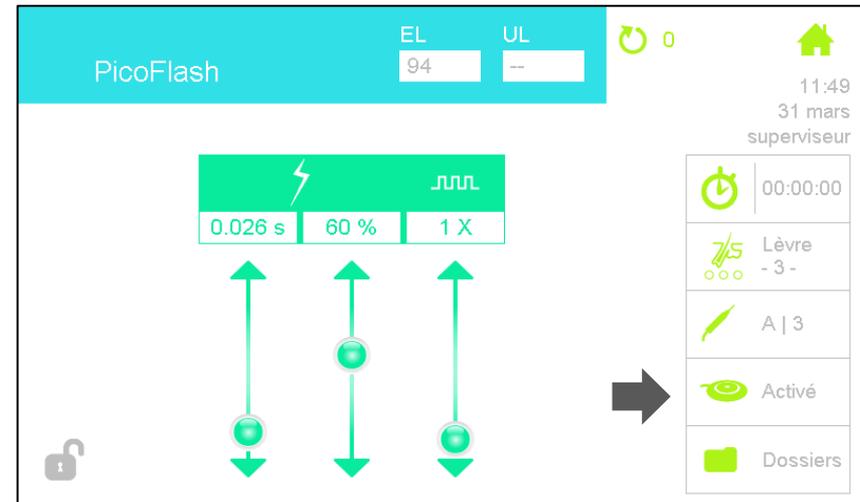


Réglage de la minuterie - 2 possibilités

1. Minuterie progressive de 0 à infini;
2. Compte à rebours; la minuterie diminue seconde par seconde:
 - Paramètres saisis avec le clavier numérique

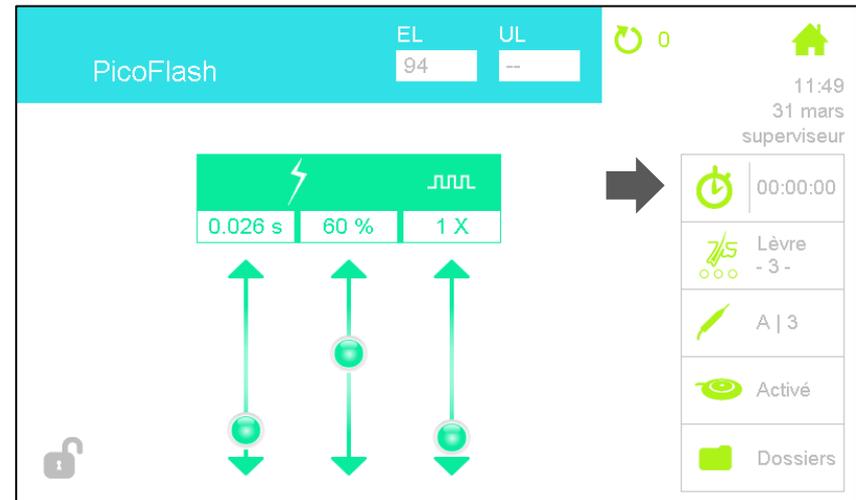

Réglage de l'alarme

- Nécessaire pour avoir un signal d'alarme avant la fin du compte à rebours.

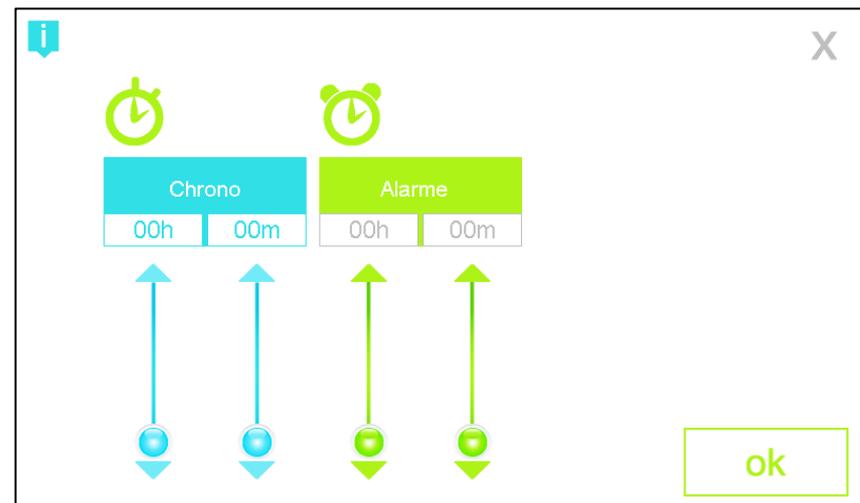



Paramètres généraux

Accueil

- Appuyez sur cette icône pour retourner au menu principal ou si vous souhaitez modifier la modalité de traitement.


Nombre d'insertions

- Affichage du nombre d'insertions effectuées;
- Vous pouvez remettre à zéro en appuyant sur la flèche circulaire.

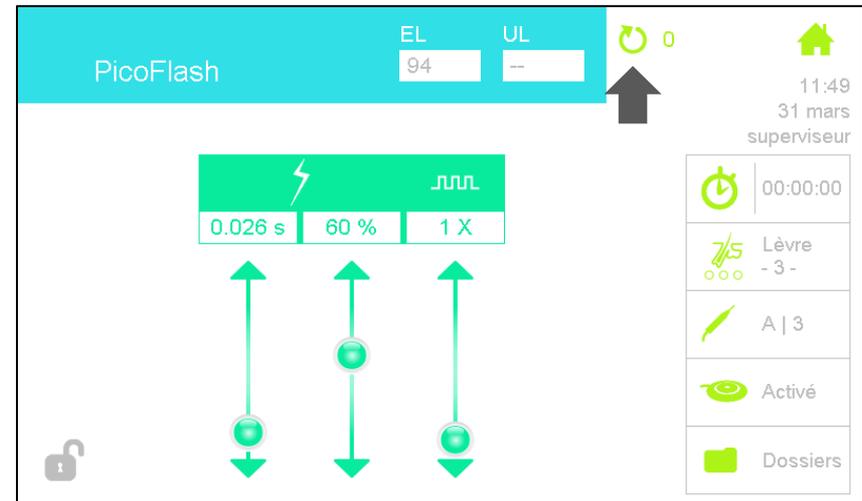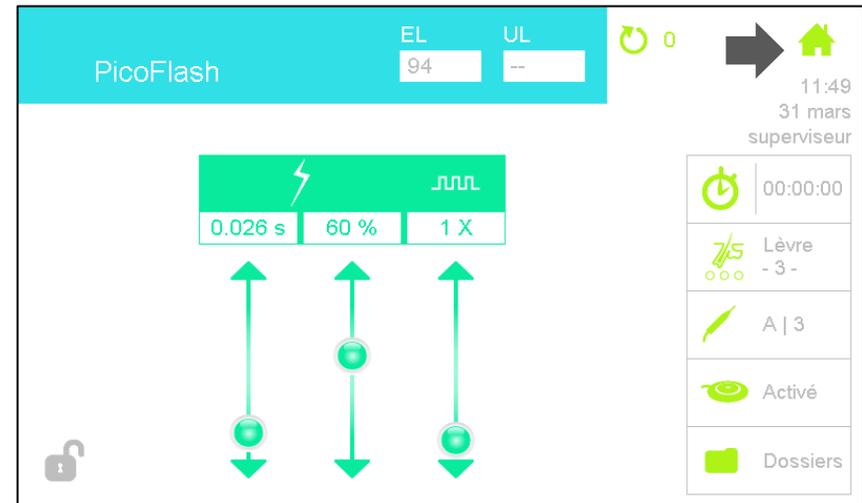



Menu des tests

TESTS

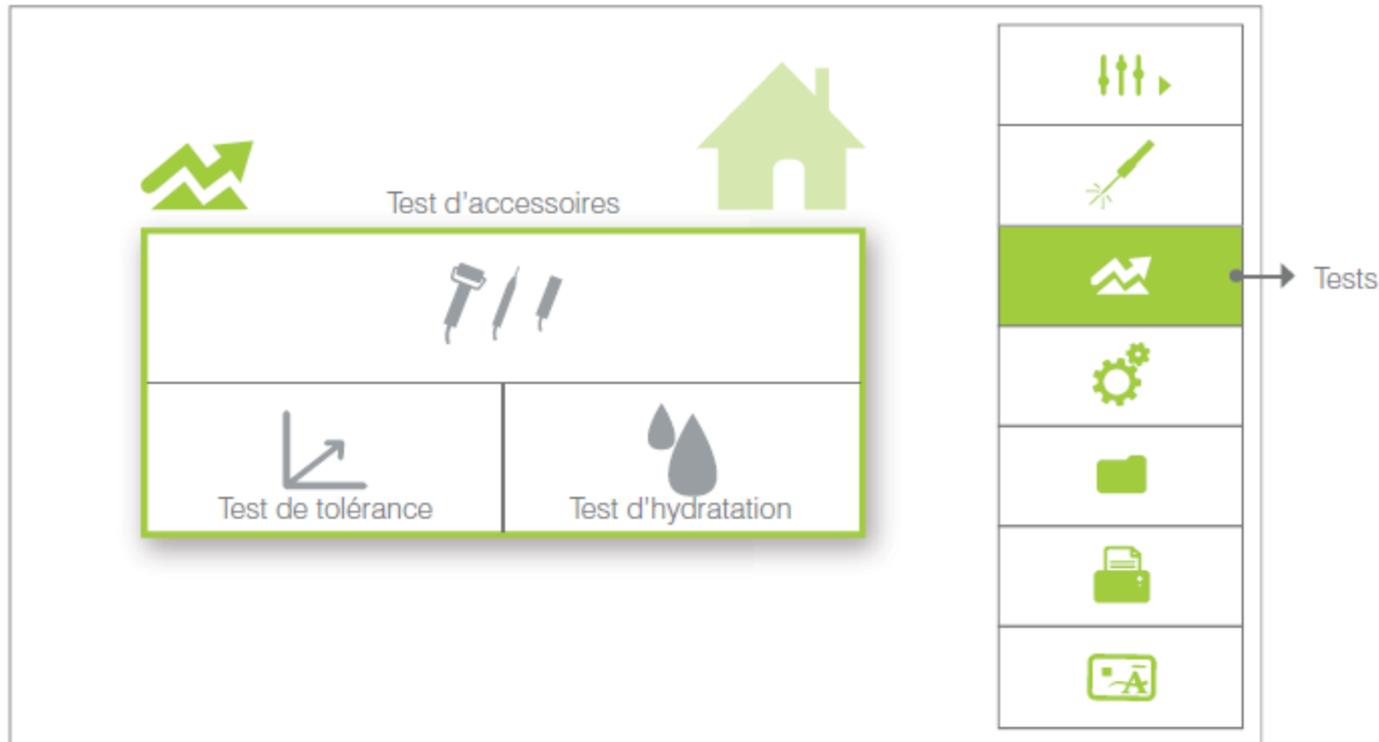


Test de tolérance

- Réglage automatique de l'intensité de courant galvanique conformément à la tolérance du client.
- Il est recommandé de faire 2-3 tests et de prendre le résultat du dernier.
- Vous devez effectuer une insertion et appuyer sur la pédale jusqu'à ce que la cliente vous avise lorsque son seuil de tolérance a été atteint.
- L'électrode-plaque ou l'électrode-barre et une éponge humide sont nécessaires.

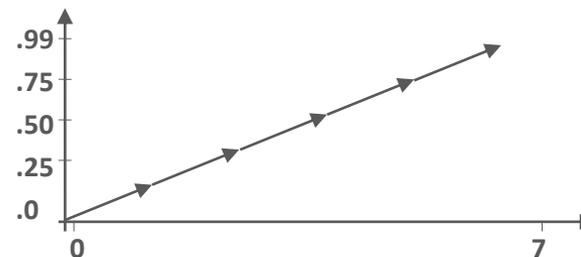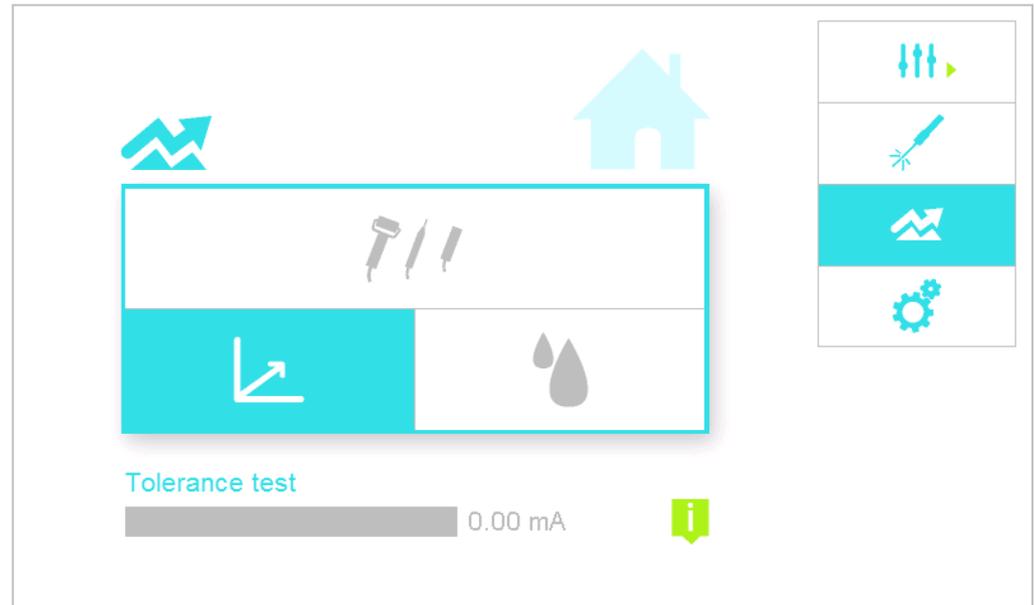

Test d'hydratation

- Pour effectuer le test d'hydratation à la surface cutanée ou à l'intérieur du follicule pileux.
- L'électrode-plaque ou l'électrode-barre et une éponge humide sont nécessaires; placez-les près de l'endroit à traiter et en contact avec la peau de la cliente.
- Test cutané : vous devez utiliser l'électrode rouleau et le tourner lentement sur la peau.
- Test pileux : vous devez effectuer une insertion et appuyer sur la pédale.

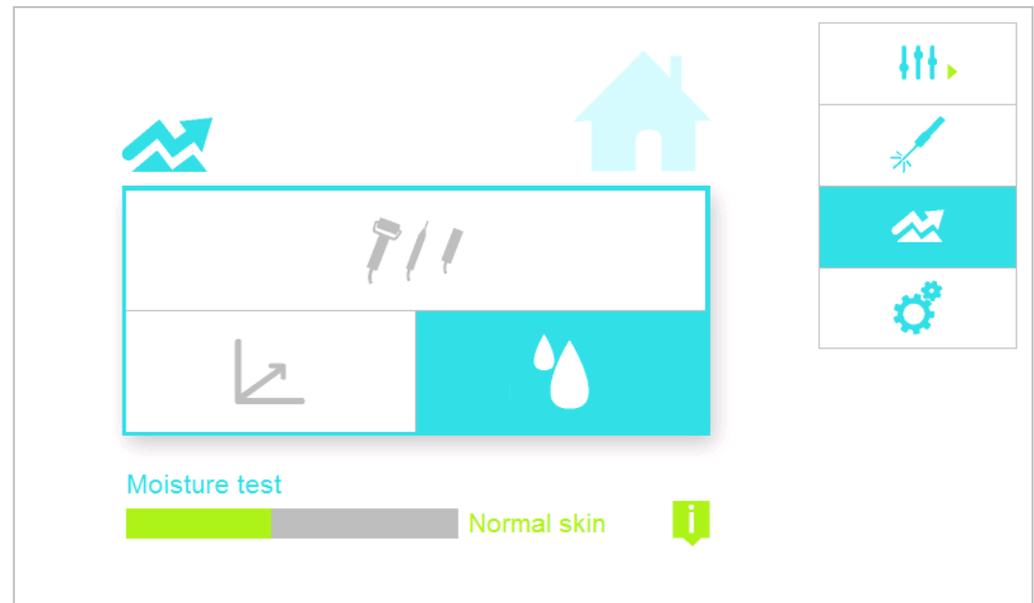


Non disponible aux É.U.



- Pour tester l'état des câbles et des portes filaments.
- Suivre les instructions apparaissant à l'écran.

Menu de configuration

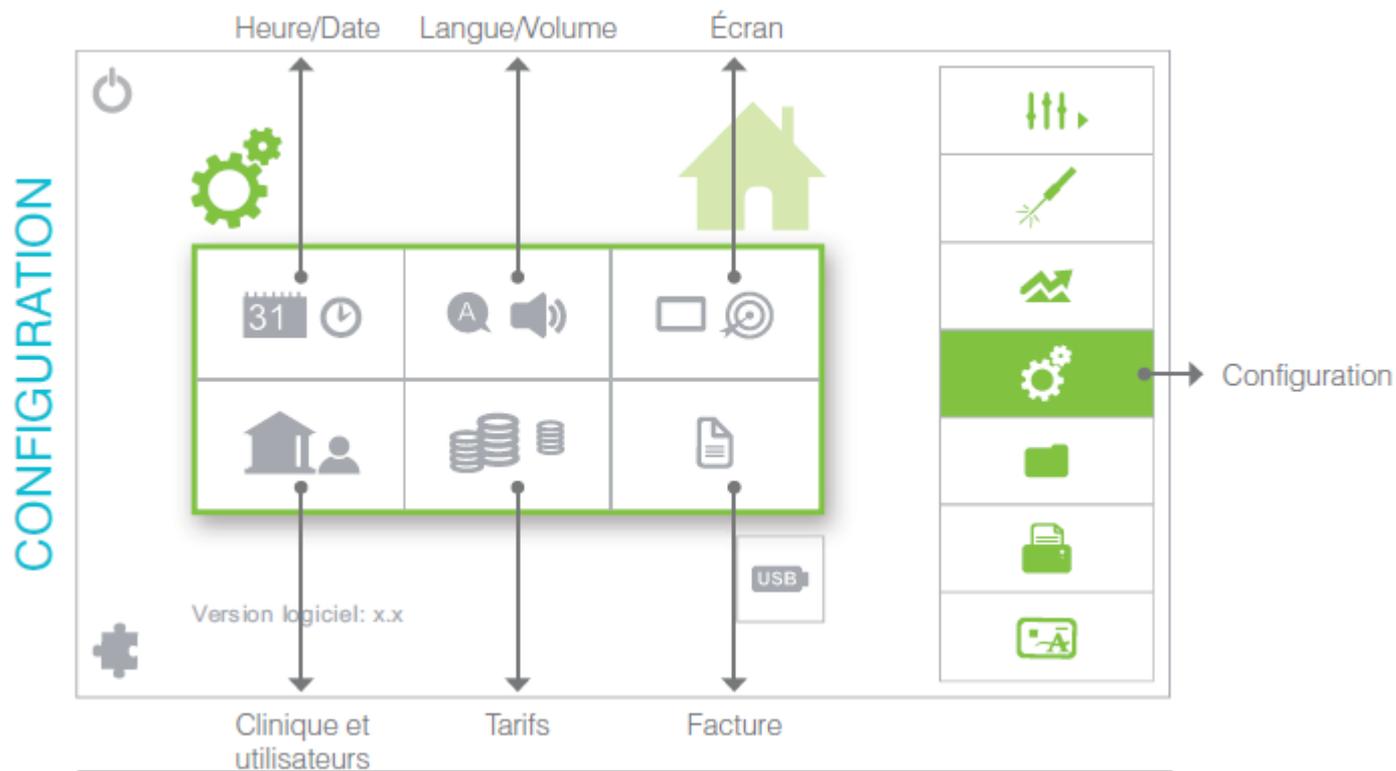

Les 3 sous-menus de la partie inférieure sont disponibles seulement sur la version Pro

Menu de configuration (Pur et Pro)



Menu de configuration clinique (Pro)

CLINIQUE ET UTILISATEURS

Apilus xCell

Téléphone
418-555-1234

Courriel
apilus@dectro.com

Note

Code de la clinique
00000

X Fiche ouverte?

Nombre d'insertions
69

Nombre de séances
1

Temps moyen
00:07

Temps total
00:07

- Gestion utilisateurs, mots de passe, accès superviseur
- Statistiques de traitement (cumulatif)
- Remise à zéro des statistiques
- Impression infos de la clinique
- Impression rapports revenus X, Z
- ok

Obliger ouverture fiche

Code pour cartes à puce

Menu de configuration de l'utilisateur (Pro)

 PicoFlash	 EvoluBlend
 MultiPlex	 SynchroBlend
 MeloFlash	 Cata Ion +
 Synchro	 Ana Ion -
 PicoBlend	 Electroporation
 OmniBlend	 Drainage
 MultiBlend	 Lifting



Menu de configuration des statistiques cliniques (Pro seulement)

X



Statistiques d'utilisation

▶ Sourcil	Lèvre
▶ Lèvre	Nombre d'insertions moyen 2
▶ Menton	
▶ Bras	Nombre d'insertions total 2
▶ Jambe	Temps moyen 00:02
▶ Cheveux	
◀ ▶	Temps total 00:02

Menu de configuration des taux (Pro seulement)





Devise Décimales Montant min.

Tarifs

<input type="text" value="0.00 \$"/>			
<input type="text" value="/15m"/>	<input type="text" value="/30m"/>	<input type="text" value="/45m"/>	<input type="text" value="/60m"/>
<input type="text" value="0.00 \$/m"/>			

Carte à puce

<input type="text" value="0.00 \$"/>			
<input type="text" value="/150m"/>	<input type="text" value="/300m"/>	<input type="text" value="/600m"/>	<input type="text" value="/900m"/>
<input type="text" value="0.00 \$/m"/>			

Taxe 1 Taxe 2

Menu de configuration des factures (Pro)



```
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Facture #: 0000000
2013-12-17 14:26
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Fiche #: 00000
Lane, Suzan
Nombre de visites: 1
Type filament: TH | 3
Bras.....20

Rapport de traitement
-----
Nbr insertions: .....52
Total: .....52
Temps de trait.: .....00h31
Total: .....00h31
Taux horaire: $25.00/15m
-----
Sous-total.....$51.66
TX1 (07.00%).....$3.61
TX2 (07.50%).....$4.14
-----
Total.....$59.14

Votre électrolyste:
Julie

Prochain RV: 2011-01-01
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```



- Nbr insertions
- Filament
- Région
- Cumulatif
- Usager
- Tarifs

Texte à ajouter

- Copie clinique
- Copie client

Code Z

Sauvegarde, transfert de données et mises à jour **APILUS®**

USB

The screenshot shows a software window titled 'USB' with a close button (X) in the top right corner. On the left, there are three backup options, each with a green checkmark and a timestamp of '2013/08/28 14:39':

- ✓ Base de données - clients
- ✓ Base de données - utilisateurs
- ✓ Base de données - configuration


On the right, there is a vertical menu with four icons and their corresponding actions:

- Icon: Document with arrow to USB → Action: Sauvegarde de données de l'appareil vers la clé USB
- Icon: USB with arrow to document → Action: Transférer la sauvegarde de données de la clé USB vers l'appareil
- Icon: USB with upward arrow → Action: Éjecter la clé USB
- Icon: Refresh symbol → Action: Mettre à jour la programmation de l'appareil


- Pour installer une nouvelle version de logiciel sur la clé USB, allez à www.dectro.com/apilusxcell (utilisateur: mise à jour_xcell; mot de passe: nVzeBJdeUf) et suivre les instructions en ligne.
- Toujours effectuer la sauvegarde de vos données avant de faire une mise à jour de l'appareil.

Ajouter l'option Synchro

- Pour ajouter les options Synchro, SynchroBlend et EvoluBlend;
- Appuyez sur la touche du casse-tête dans le menu de configuration;
- Faites-nous savoir le code vert;
- Insérez le code clé que nous vous enverrons dans la boîte.

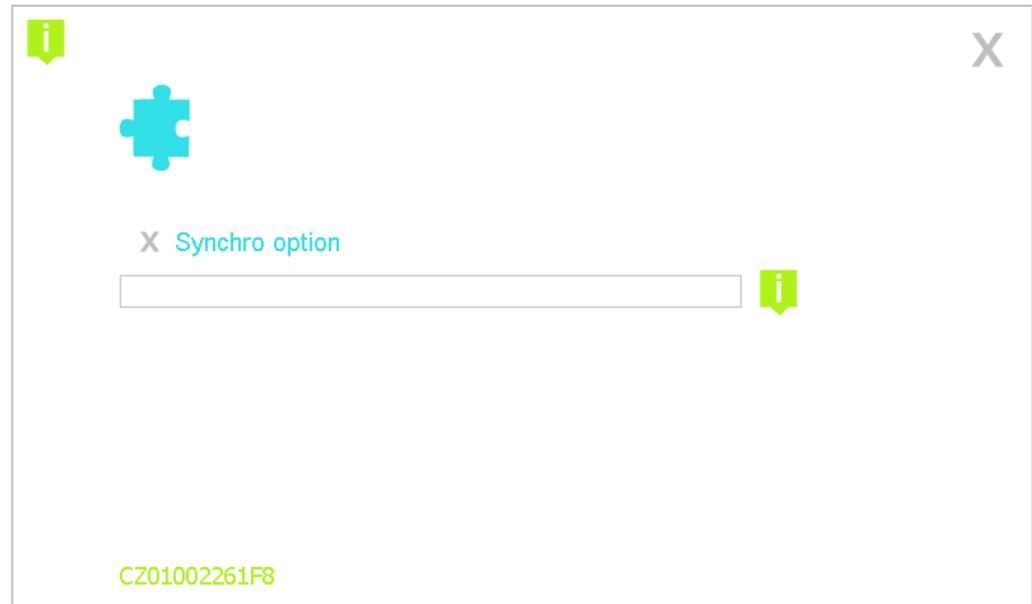

Menu des dossiers clients (Pro)

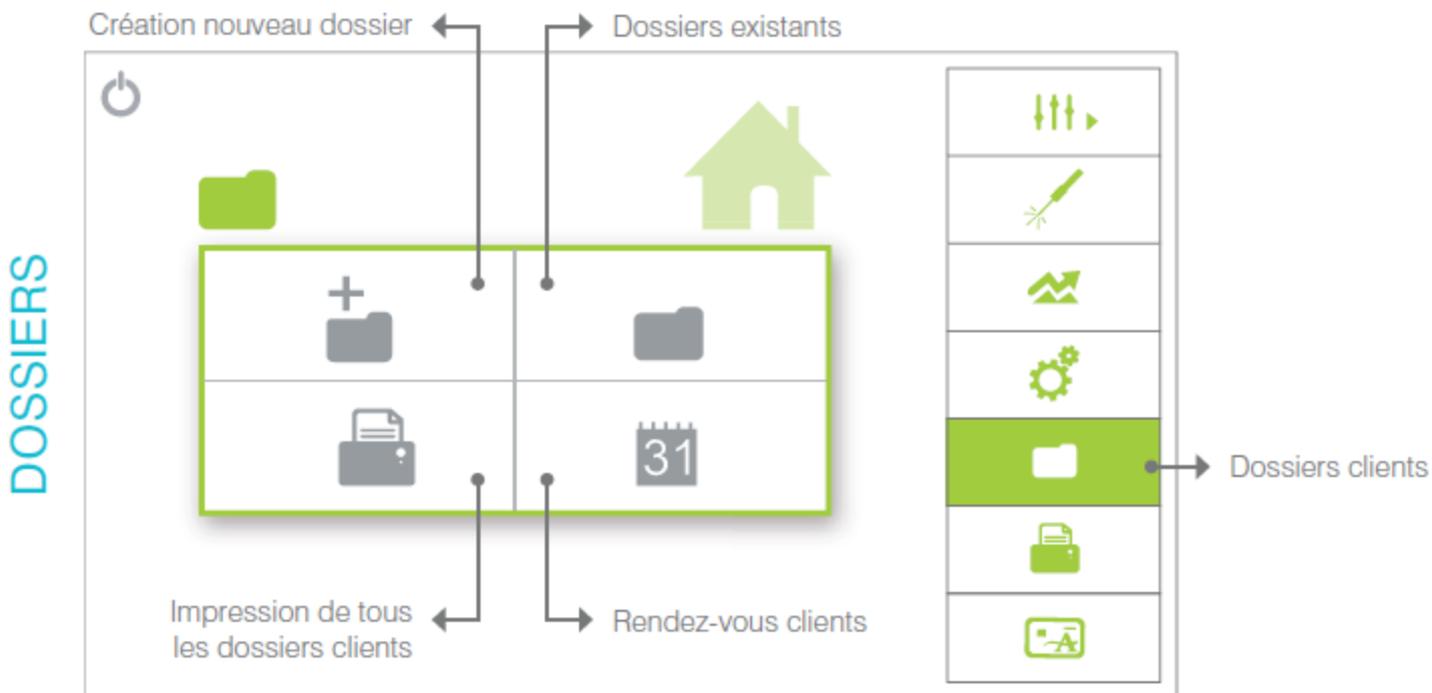

Créer un nouveau dossier client (Pro)

i

X

+

Fiche #

Nom

Prénom

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Femme

Homme

Note

ok

Menu des dossiers clients existants (Pro seulement)

i **X**

Dernière séance: 2015-04-15 15:52 Prochain rendez-vous: 2015-06-16 16:30
Lèvre 1 de 1

Bouchard, George
Tremblay, Josée (418-555-1234)

- Rechercher un dossier
- Modifier un dossier
- Statistiques
- Imprimer un dossier
- Ouvrir un dossier

Éditer un dossier client (Pro seulement)

Tremblay, Josée

X Allergie à l'iode	X Cortisone
✓ Allergie aux cosmétiques	✓ Diabète
✓ Anovulants	X Epilepsie
X Anti-inflammatoires	X Enceinte
X Antibiotiques	X Hémophilie
X Anticoagulants	X Hépatite
X Autres allergies	✓ Homéopathie
X Cicatrices	X Hormones

1/2

2/2

ok

NOTE

ok

Dernière mise à jour: 2013/12/17 14:24

Pour activer une condition sur la fiche médicale, appuyer sur le X situé à côté de la condition. Un crochet vert apparaîtra.

Veuillez noter qu'il y a 2 pages disponibles pouvant être sélectionnées à l'aide des touches à droite.

Lorsque vous faites une saisie, vous devez toujours valider à la fin à l'aide de la touche OK.


Menu des statistiques clients (Pro seulement)


 Tremblay, Josée

▶ Lèvre	Lèvre	Cumulatif	
	Nbr d'insertions 2 Nbr utilisations 1 Temps moyen 00:02	Nbr d'insertions 2 Nbr de séances 1 Temps moyen 00:02	
		Temps total 00:02	


Effectuer un traitement avec un dossier client

- Pour sauvegarder un traitement dans le dossier client et le facturer, vous devez ouvrir le dossier client premièrement.
- Pour ce faire, appuyez sur la touche du dossier sur l'écran de traitement, sélectionnez la touche « ouvrir dossier ».
- Puis, sélectionnez le taux/durée de traitement tel que suggéré à l'écran.
- Une fois le traitement terminé, appuyez sur la touche dossier, puis sur la touche « fermer dossier ». Vous pourrez alors imprimer la facture.

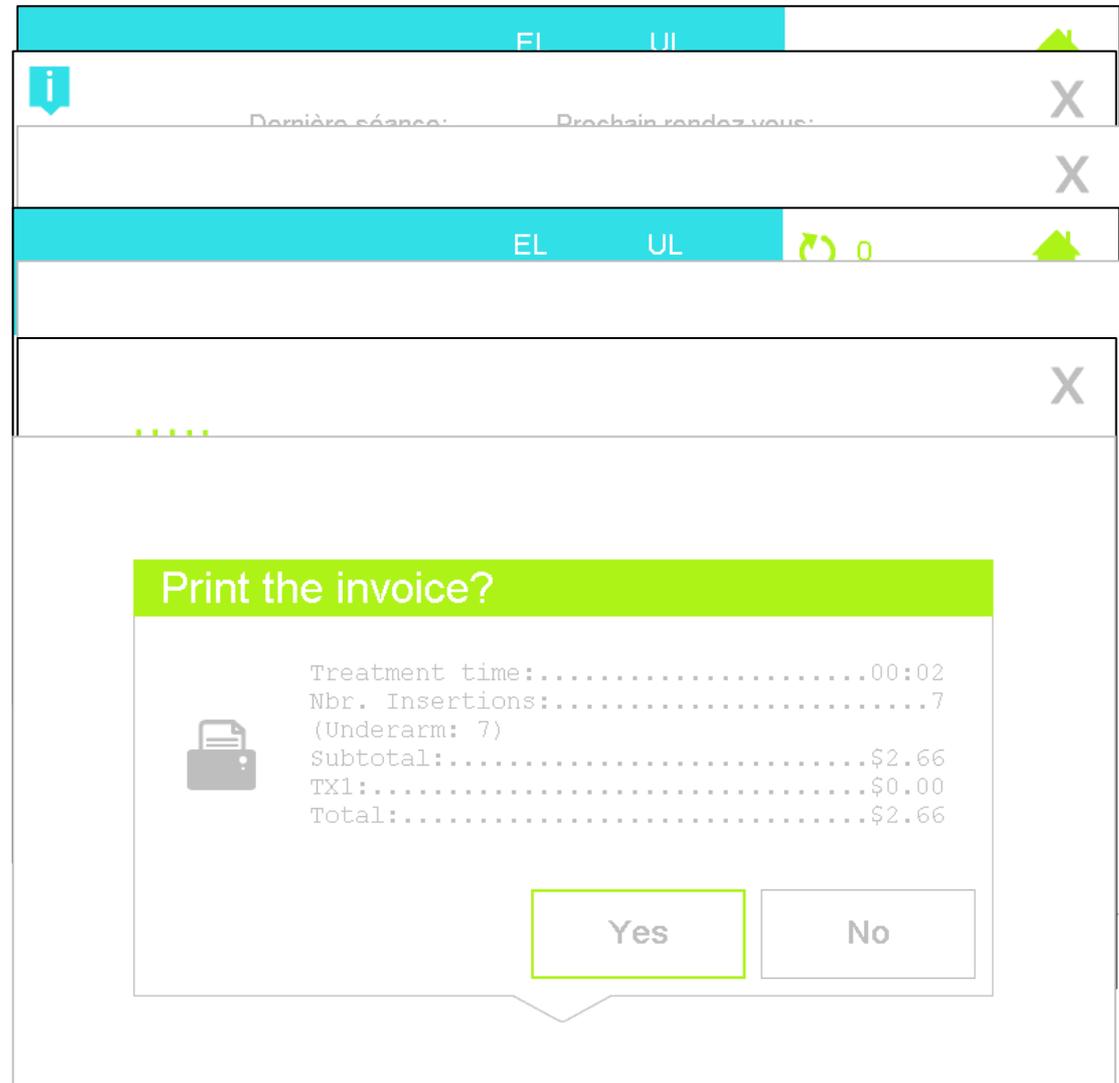


Calendrier de rendez-vous (Pro seulement)

- Chaque fois que vous terminez un traitement client, l'appareil vous demandera si vous voulez planifier le prochain rendez-vous.
- Pour voir les prochains rendez-vous à l'écran, appuyez sur le menu du dossier client, puis sur le sous-menu du calendrier de rendez-vous.
- Vous pouvez également imprimer une liste de vos prochains rendez-vous. Le rapport inclut le nom de la cliente, le numéro de téléphone et la date/heure du prochain rendez-vous.

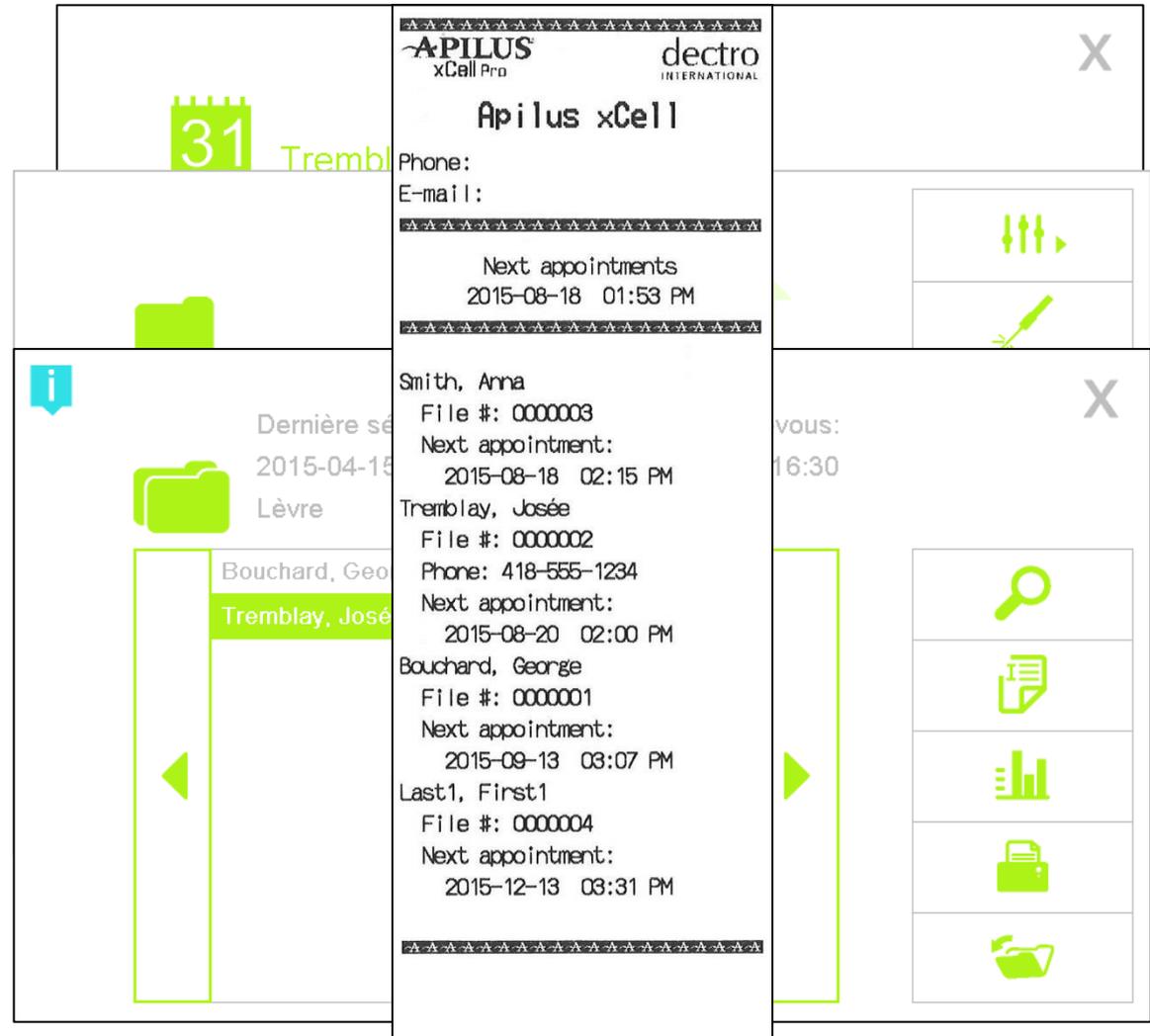


Menu de l'imprimante (Pro seulement)

IMPRIMANTE

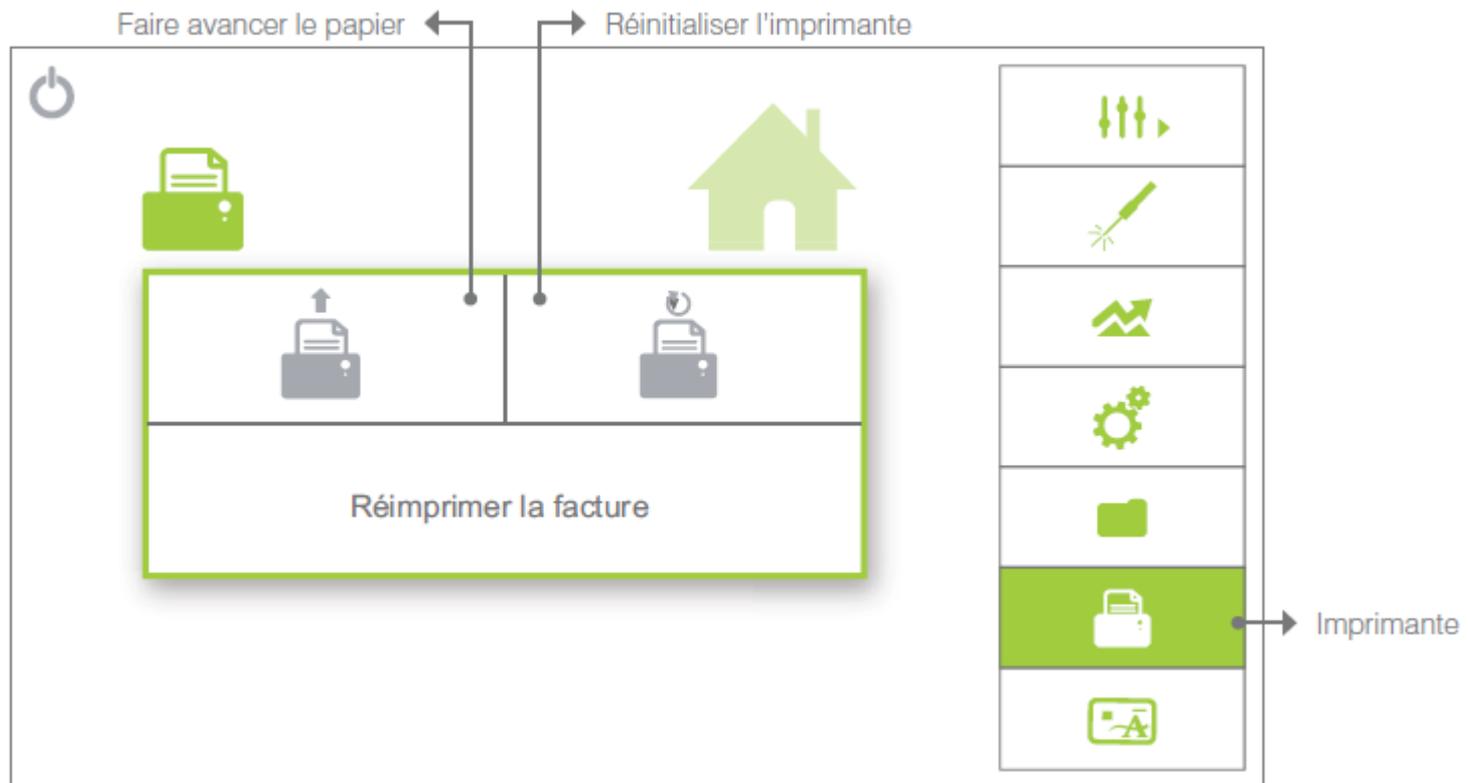

Menu de la carte à puce (Pro seulement)

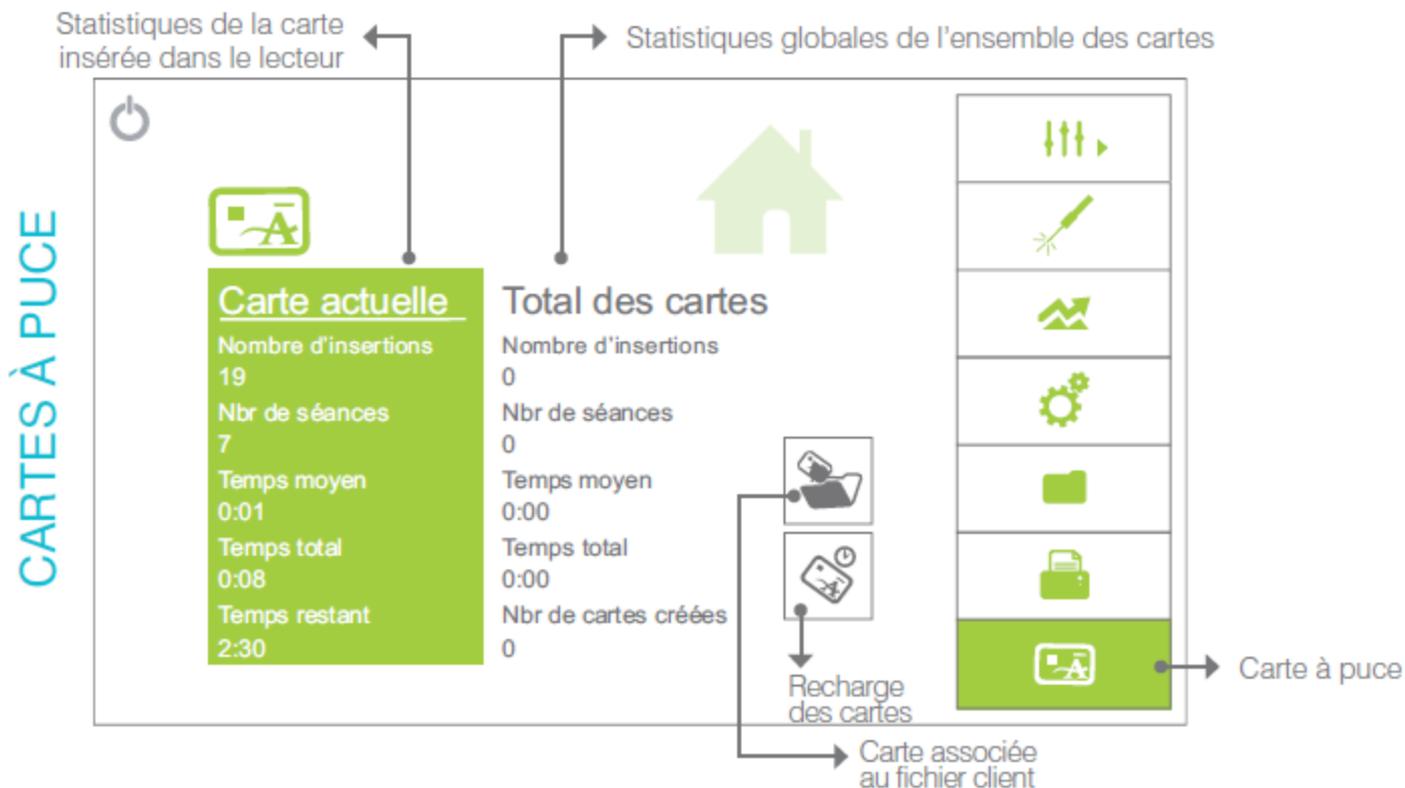

Comment utiliser les cartes à puces (Pro seulement)

APIPLUS®

- Les cartes à puces (cartes d'épilation prépayées) sont très utiles pour offrir des forfaits de temps de crédit à votre clientèle pour aider à générer des revenus plus rapidement et aider à renforcer la fidélisation des clients.
- Leur utilisation est très simple et flexible.
- Vous décidez le nombre de minutes et les taux qui sont inscrits sur les cartes prépayées.
- Chaque carte est associée avec votre institut et un dossier client.
- La carte contient des informations sur la cliente et les traitements reçus.
- Il est possible de recharger la carte client avec des minutes additionnelles et de réutiliser la carte lorsque vous proposez de nouveaux forfaits.



Comment utiliser les cartes à puces (Pro seulement)


- Au moment de la première mise en marche, vous devez amorcer la fonction de la carte à puce.
- Pour ce faire, insérer la « carte maîtresse » incluse avec l'appareil.
- On vous demandera également de créer un code clinique.
- Ce code sera associé avec vos cartes à puces; il est donc important de ne pas le changer une fois que vous avez vendue la première carte.



Comment utiliser les cartes à puces (Pro seulement)

Création d'une nouvelle carte


- Pour créer une nouvelle carte à puce, insérez la carte dans la fente située au côté droit du panneau frontal de l'appareil.
- L'appareil vous demandera si vous voulez créer une carte, associer une carte à un dossier client existant et choisir le nombre de minutes/taux à inscrire sur la carte.
- Puis, l'appareil imprimera un bilan sur la carte créée.
- Finalement, l'appareil vous demandera si vous souhaitez commencer un traitement (la durée du traitement sera alors débitée).

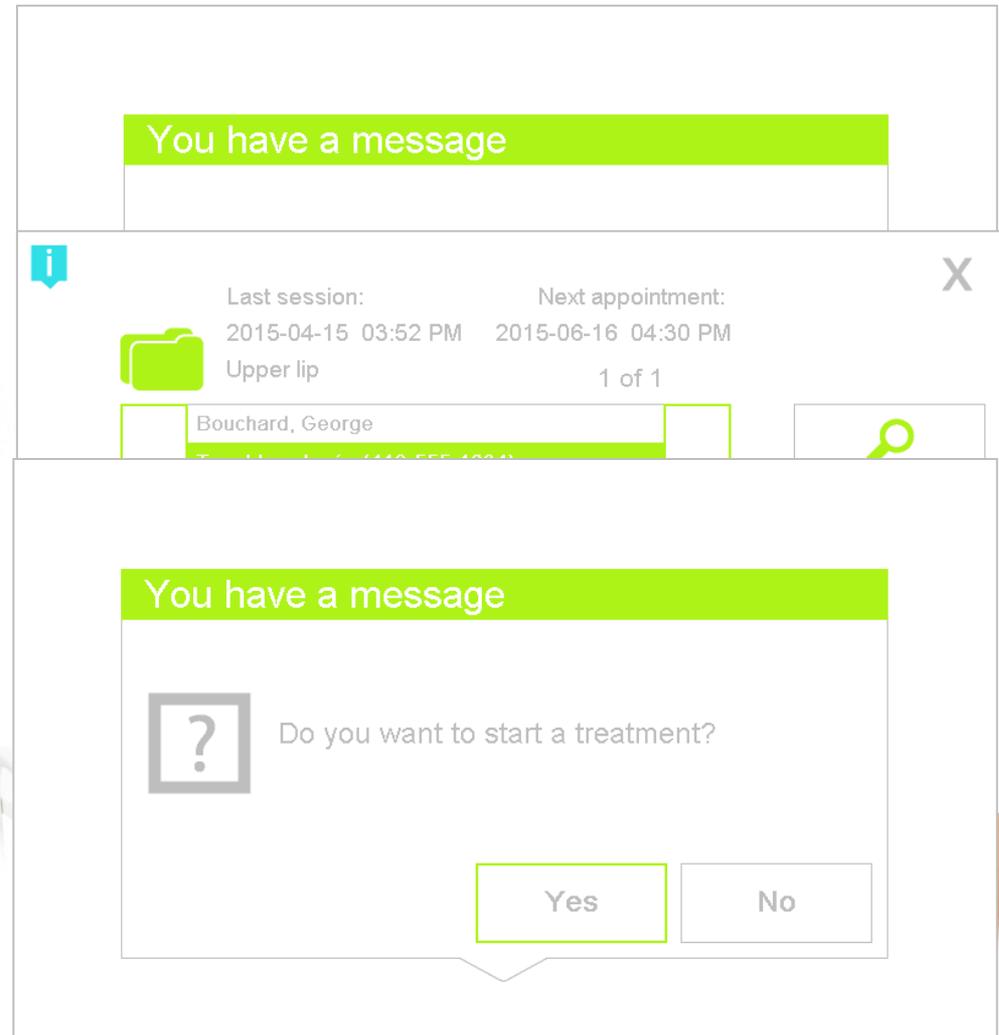

Comment utiliser les cartes à puces (Pro)

Débit du temps sur une carte existante


- Insérez la carte à puce du client dans l'appareil.
- L'appareil vous indiquera que la carte est associée à un dossier client existant et vous demandera si vous souhaitez commencer un traitement (la durée du traitement sera alors débitée).
- La carte à puce et le nom de la cliente apparaîtra sur l'écran de traitement.
- Une fois le traitement terminé, appuyez sur la touche carte à puce sur l'écran de traitement, puis fermez-le. Un rapport sera imprimé.

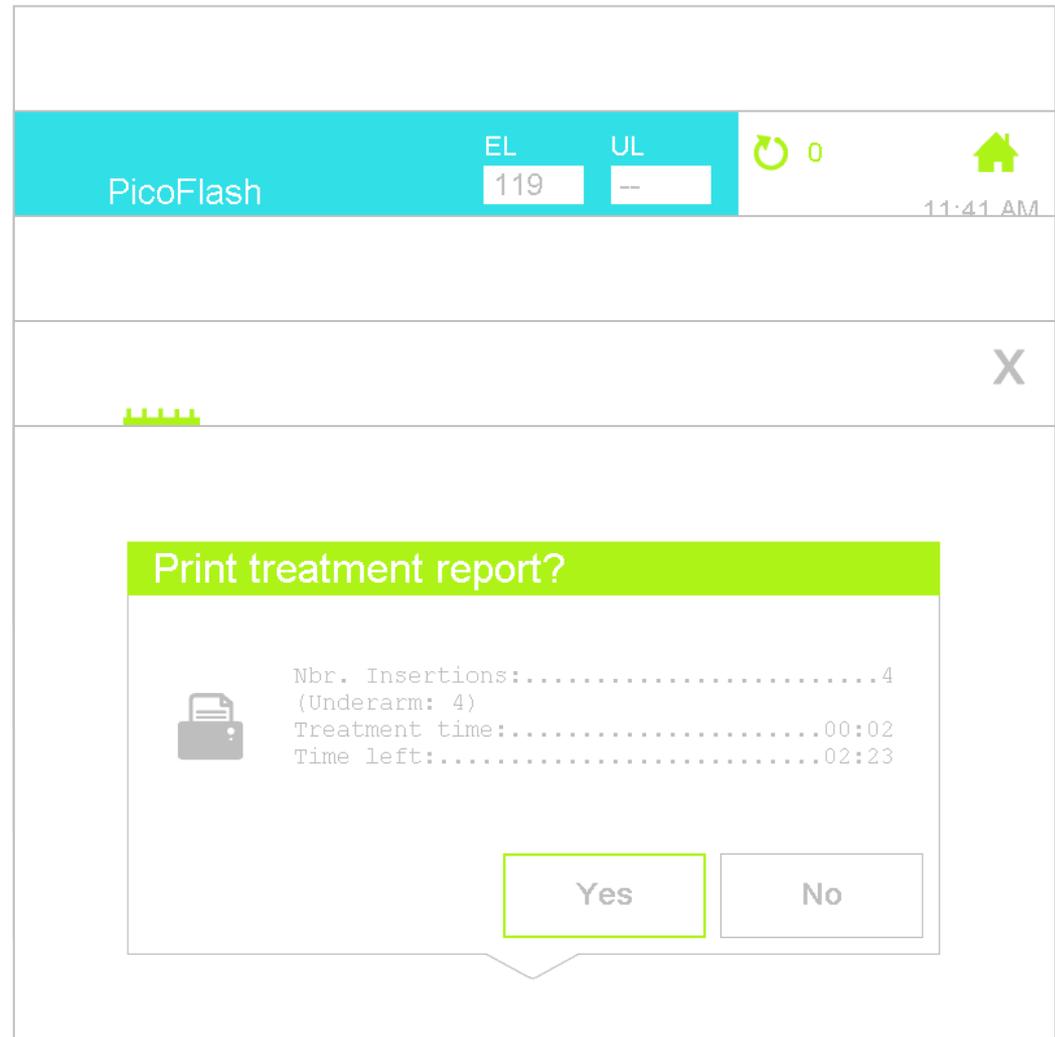

Comment utiliser les cartes à puces (Pro seulement)

Recharger des minutes additionnelles sur une carte

- Quand les minutes ont expiré sur une carte à puce, l'appareil vous demandera si vous souhaitez recharger la carte.
- Si vous la rechargez, sélectionnez le nombre souhaité de minutes et le taux à ajouter et un bilan sera imprimé.
- Si vous ne rechargez pas la carte, elle deviendra inutilisable.

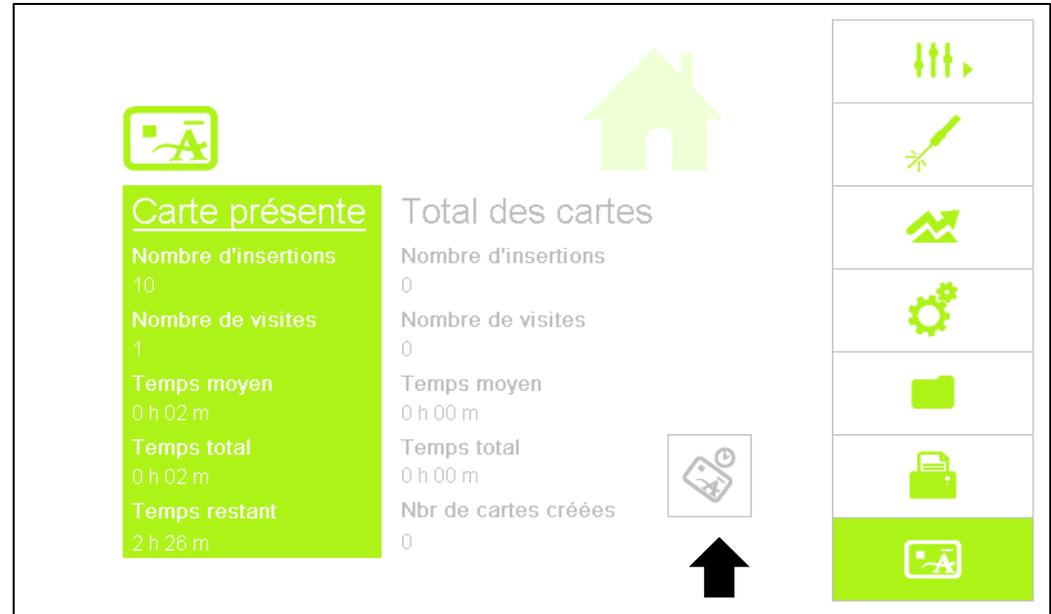

Ajouter des minutes sur une carte existante

- Pour ajouter des minutes à une carte existante qui contient encore des minutes, allez au menu de la carte à puce et appuyez sur l'icône Recharger cartes.
- Sélectionnez le nombre de minutes et le taux à ajouter et un bilan sera imprimé.

Appareils dermaphasiques (optionnels)

- Pour travailler en synergie avec l'Apilus xCell
- Spécialement conçu pour optimiser les soins esthétiques et corporels
 - IM – IonoMassage
 - SM – StimuloMassage
 - LT – Luminothérapie
 - IR – Infrarouge





VitaPhase SM
Stimulomassage

10 électrodes
5 LED 660 nm
Photothérapie
Massage vibrant
Microcourant
Revitalisant, stimulant
Tonifie la peau et réduit
l'aspect des rides



VitaPhase IM
Ionomassage

Iontophorèse
Massage vibrant
Favorise la pénétration des
produits
Effet purifiant
Rétablit le pH
Apaïse



VitaPhase LT
Luminothérapie

Bleu : purifiant
Vert : Réduit l'apparence des
rougeurs et de la
pigmentation
Rouge : réduit l'aspect des
rides
Optimise l'effet des produits
cosmétiques



VitaPhase IR
InfraRouge

Pénétration cutanée profonde
Donne une apparence plus
ferme à la peau
Stimulant
Réduit l'aspect des signes de
vieillesse
Réduit l'aspect de la cellulite
Sensation de bien-être

Un investissement rentable!

- L'épilateur informatisé le plus avancé du marché
- Modalités 27.12 MHz exclusives
- Synchro et SynchroBlend brevetés
- Plus efficace
- Confort inégalé
- Polyvalent
- Sécuritaire



Passez à l'excellence



APILUS[®] MD

xCell

27.12 MHz